


AFR-Mini-Reg - Gebrauchsanweisung

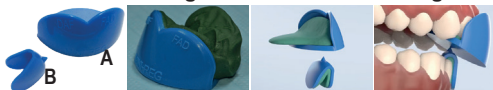

Reinigen Sie alle Teile mit einem Desinfektionstuch. Um das Teil A und B des Mini-Regs zu fixieren, sollte ein geeignetes Material wie z.B. (Compound Sticks, Putty Silicon, PVS, Biss Registration Silicon, ...) verwendet werden. Das Mini-Reg muss fest an den Schneidezähnen sitzen.



Wenn beide Teile des AFR-Mini-Reg eingesetzt sind, lassen Sie den Patienten für ca. 5 Minuten auf dem JIG Splint entspannen. Verwenden Sie BAUSCH Arti-Spray weiß BK 285 zur Überprüfung der Unterkieferbewegungen. In der Regel braucht der Patient etwas Übung und Anleitung, um die Unterkieferbewegungen durchzuführen. Bei Bedarf sind diese Übungen zu wiederholen.



Wenn der Patient sich entspannt hat, kann die Registrierung begonnen werden. Er soll dabei den Unterkiefer in alle horizontalen Richtungen bewegen. Die Spitze des gotischen Bogens ist die CR-Position des Unterkiefers. Erwärmen Sie das CR Bite Wax® auf ca. 55°C für die Registrierung in CR (Zentrische Relation). Das CR Bite Wax® ist speziell vorgeformt und wird im OK hinter dem AFR-Mini-Reg eingegliedert.




Führen Sie den Unterkiefer in die CR-Position und lassen Sie den Patienten in das Wax leicht einbeißen. Verwenden Sie einen Gesichtsbogen, um die Position des Oberkiefers zu bestimmen. Montieren Sie das Oberkiefermodell im Artikulator. Platzieren Sie das Wachs-Bissregistrat auf das Oberkiefermodell. Positionieren Sie das Unterkiefermodell auf das Registrat und gipsen Sie das Unterkiefermodell ein.




Bevor das untere Modell in den Artikulator integriert wird, sollte der Inzisalstift auf ca. ≤ 10 mm Bisshöhe gestellt werden, um die vertikale Dimension des Registrats auszugleichen. Dies ist die maximale vertikale Höhe des AFR-Mini-Regs. In CR-Position sind die Kondylen in Rotation. Daher hat die Erhöhung des Bisses von ≤ 10 mm keinen signifikanten Einfluss auf die genaue CR-Position.



Entfernen Sie die Wachsplatte, wenn Sie die vertikale Dimension im Artikulator absenken. Wenn Sie den ersten okklusalen Interferenzkontakt in CR-Position mit der Shimstockfolie (Bausch Arti-Fol Metallic BK 38) identifiziert haben, können Sie die Situation auch mit Artikulationspapier oder Folie im Artikulator und Mund des Patienten vergleichen.

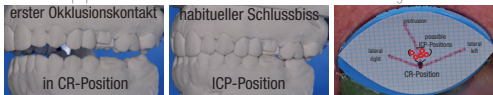

Wenn die ICP-Position in der Ebene der Unterkieferbewegung erkannt werden konnte, ist die CR-Position korrekt. Wenn es nicht möglich ist, eine ICP-Position zwischen den Gipsmodellen zu erkennen, kann die Abweichung in einem der vorherigen Schritte festgestellt werden.

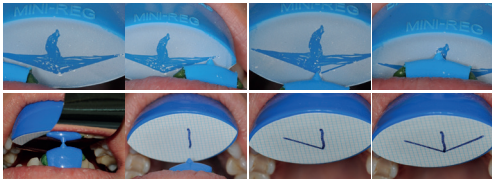

Mit den selbstklebenden Millimeter Etiketten können Sie die Unterkieferbewegungen auch mit einer Okklusionsprüffolie (Arti-Fol) registrieren - Dieses Etikett kann mit dem beigefügten Kunststoff-Etikett versiegelt und in der Patientenakte gespeichert werden.



Dentrade e.K. IFU-AFR-Mini-Reg 2019-02

Eine ausführliche Gebrauchsanweisung, Anwendungsvideos, ... sind auf unsere Seite verfügbar: www.dentrade.com

