Bechtozid Premium

Fertiglösung

Anwendungsbereich

Für die hochwirksame, rückstandsfreie Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Handund Winkelstücken

Anwendung

Bechtozid Premium unverdünnt auf ein fusselfreies Einmaltuch sprühen und die zu desinfizierende Oberfläche vollständig einreiben. Auf vollständige Benetzung achten. Geeignet für das medizinische Inventar, z.B. Möbel, Schwebetische, Unit- und Türgriffe, sanitäre Einrichtungen sowie Hand- und Winkelstücke. Bei empfindlichen Materialien (z.B. Acrylglas/Sitzpolster) vorab auf Verträglichkeit testen.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und levurozid in 30 Sekunden (EN 13727/13624)
- wirkt tuberkulozid (M. terrae) in 30 Sekunden (EN 14348)
- getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand 4/2015) und gelistet bei der VAH
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/H1N1/Vaccinia-Viren in 30 Sekunden (EN 14476)
- erfüllt die Anforderungen an die vollständige Viruzidie (Adeno/HPV in 1 Minute, Polio in 2 Minuten) nach EN 14476
- frei von Aldehyden und Phenolen
- geeignet f
 ür alle alkoholbeständigen Oberfl
 ächen
- korrosionssicher
- parfümfrei oder mit frischem Citrusduft
- pH-Wert: 11,5

Bechtozid **Premium Guarante and Control of Control o

Zusammensetzung

100 g Bechtozid Premium enthält: 60 g Ethanol

Lieferform

REF 561PF Flasche mit 1 Liter Fertigösung, parfümfrei wiederbefüllbar, ohne Sprühkopf

Wiederberdinbar, Office Sprunkopi

REF561 Flasche mit 1 Liter Fertiglösung, mit Citrusduft, wiederbefüllbar, ohne Sprühkopf

DEE 504 EDE - Karistarasit E Lit

REF 561.5PF Kanister mit 5 Liter Fertiglösung, parfümfrei Kanister mit 5 Liter Fertiglösung, mit Citrusduft Kanister mit 10 Liter Fertiglösung, parfümfrei Kanister mit 10 Liter Fertiglösung, mit Citrusduft

Hersteller

Alfred Becht GmbH Carl-Zeiss-Str. 16 D-77656 Offenburg Tel.: +49 781 60586-0

Fax: +49 781 60586-40 www.becht-online.de

Haltbarkeit

30 Monate

Zubehör

REF 567.5 Dosierpumpe für 5 Liter Kanister

REF 567.10 Dosierpumpe für 10 Liter

Kanister

REF 544.SP Sprühkopf für 1 Liter

Flasche

REF 567.51 Ausgießer für 5 und 10

Liter Kanister

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15, EG-Zertifikat: G1 17 09 49628 01**0**, TÜV SÜD Product Service GmbH, München

