



Betriebsanleitung BA

1. Allgemein:

- 1.1. Produktbezeichnung:**
- | | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| Bißwälle mit Geschmacksstoff Zitrone | gelb weich | 610-0100 |
| Bißwälle mit Geschmacksstoff Erdbeer | rosa hart | 611-0100 |
| Bißwälle mit Geschmacksstoff Apfel | grün mittelhart | 612-0100 |
| Bißwälle mit Geschmacksstoff Orange | orange mittelhart | 613-0100 |
- 1.2. Lieferumfang:** **Kartonagen**
Inhalt je Farbe und Karton (96 Stück)
- 1.3. Herstelleranschrift:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tel.: 07733-9410-0; FAX: 07733-9410-22
- 1.4. Lagerbedingungen:** Lagerung bei Raumtemperatur min +10° C bis + 30° C
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, bei Temperaturen unter 8° C besonders bei Temperaturen im Minusbereich erhöhte Bruchanfälligkeit
Packungen vor Schlag und Sturz schützen -

2. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Bißwälle zur Verwendung im zahntechnischen Labor, besonders in der Total- und Teilprothetik.
Zur Bißnahme, bzw. Festlegung der Bißsituation, kurzfristig im Munde des Patienten.
Durch Erwärmung (offene Bunsenflamme/Wasserbecken) sind die Bißwälle in der Form veränderbar.
Das Erweichen oder Verflüssigen des Wachses zur eigentlichen Bißnahme im Munde des Patienten ist mit geeigneten Instrumenten von geschultem und geeignetem Fachpersonal außerhalb des Patienten durchzuführen.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen sämtliche Garantie und Haftungsansprüche!

3. Risiken und Gefahren in der Anwendung:

1. Sicherstellen, daß sachunkundige Personen (z.B. Kinder) mit dem Produkt nicht in Berührung kommen.
2. Heiße Wachstropfen auf Hautoberflächen vermeiden. Einatmen der Wachsdämpfe beim Verbrennen/Ausbrennen vermeiden. (Schutzkleidung nach Bedarf)
3. Wachs darf nur kurzzeitig, und nicht dauerhaft im Munde des Patienten eingebracht werden
4. Bißwall zum Basiskörper so verbinden, daß eine Verschluckungs,- oder Erstickungsgefahr für den Patienten nicht besteht.

4. Bedienungsanleitung:

4.1. Vorbereitung

Verpackung auf der oberen Seite an entsprechender Markierung/Deckel öffnen.

4.2. Anwendung

Bißwälle mit erwärmtem Wachsmesser oder geeignetem Instrument ablängen und auf dem Arbeitsmodell nach leichter Erwärmung (Bunsenbrenner/Wasserbad) ausrichten und anpassen. Auf den Basiskörper aufmodellieren und ausreichende Haftung mittels verflüssigtem Wachs gewährleisten. Kleinststücke von Bißwällen sollten aufgrund geringer Verbindung zum Basiskörper vermieden werden.

4.3. Nach Anwendung

Wiederverwendbare Bißwallreste ins Behältnis zurücklegen, Deckel schließen, vor Staub schützen.

5. Entsorgung: Kann entsprechend der geltenden Vorschriften im Restmüll entsorgt werden. Die Umverpackung kann der Wertstoffverwertung (Duales System) zugeführt werden.

6. Haltbarkeit: **Verbrauchsmaterial sollte generell nach Öffnen der Originalverpackung zügig und umgehend innerhalb weniger Monate aufgebraucht werden.**
Die Geschmacksstoffe sind lebensmittelecht und verflüchtigen sich !

| Dokument: | Erstellt am/von: | geändert am/von: | Revision: | freigegeben am/von: | Seitenzahl: |
|-----------|------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| BA | 14.01.2021/OB | 14.01.2021/OB | 0 | 14.01.2021/TB | Seite 1 von 2 |

Betriebsanleitung BA

7. Symbole

| | |
|---|-------------------------------------|
|  | Hersteller |
|  | CE Zeichen |
|  | FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY (USA) |
|  | Nicht steriles Produkt |
|  | Bestellnummer |
|  | Chargennummer |
|  | Herstelldatum |
|  | Verwendbar bis |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Dokument: | Erstellt am/von: | geändert am/von: | Revision: | freigegeben am/von: | Seitenzahl: |
| BA | 14.01.2021/OB | 14.01.2021/OB | 0 | 14.01.2021/TB | Seite 2 von 2 |