

Retrax® Gel AS / Retrax® Gel AS Clear

Jede Einmal-Spritze enthält 0,75 g mit 25 %igem Aluminiumsulfatgel.

DE

Indikationen zur Verwendung:

Retrax® Gel AS/Retrax® Gel AS Clear ist für den Gebrauch mit allen Arten von Retraktionsfäden geeignet. Es unterstützt die Gingivaretraktion und wirkt hämostatisch. Retrax® Gel AS/Retrax® Gel AS Clear erleichtert das erstmalige Legen des Fadens, da der Faden durch Verwendung des Gels in den Sulkus gleiten kann. Retrax® Gel AS/Retrax® Gel AS Clear kann während der Restaurationsdauer verwendet werden, wenn eine Gingivaretraktion und Hämostase indiziert sind. Dieses Produkt darf nur zur äußeren Anwendung in der Praxis verwendet werden. Jede Spritze ist für den Einmalgebrauch bestimmt. Retrax® Gel AS/Retrax® Gel AS Clear ist mit allen medikamentösen Fäden der Firma Pascal kompatibel.

Kontraindikationen: Keine bekannt.

Warnhinweise: Nur zur örtlichen intraoralen Anwendung. Nicht schlucken. Von Kindern fern halten.

Vorsichtshinweise:

- Nur für den professionellen Gebrauch in der Praxis.
- Nicht bei Patienten verwenden, die gegen Aluminiumsulfat allergisch sind.
- Retrax® Gel AS enthält künstliche Farben und Aromen; stellen Sie sicher, dass keine bekannten Allergien vorhanden sind.
- Retrax® Gel AS Clear enthält keine künstlichen Farben, es enthält allerdings künstliche Aromen.
- Um ein mögliches Verschlucken zu verhindern, wird ein hohes Ansaugvolumen empfohlen.
- Eine Wiederverwendung der Spritze setzt die Patienten einem erhöhten Verletzungs- oder Infektionsrisiko aus.

Dosierung: Nach Bedarf verwenden, um eine Hämostase zu erzielen und aufrechtzuerhalten. Bei normalem Gebrauch sollten mit jeder Einmalspritze bis zu zwei Applikationsstellen behandelt werden können.

Gebrauchsanweisung:

- Die mit 0,75 g vorgefüllte Spritze sollte zusammen mit einer Einwegapplikatorkanüle oder einer MicroFusor™-Spitze verwendet werden.
- Die Spritzenkappe entfernen und die Applikatortspitze aufsetzen.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen Spritzenkolben vor der erstmaligen Verwendung leicht herausziehen.
- Vorsichtig einen dünnen Geltropfen im Sulkusbereich applizieren.
- Einen Faden auswählen und in das Gel legen. Anschließend 2-6 Minuten warten.
- Sollte die Blutung anhalten, den Bereich spülen und erneut Gel auftragen.
- Anschließend wieder 2 - 6 Minuten warten.
- Faden entfernen.
- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse die Applikationsstelle gründlich spülen und trocknen.
- Wie gewohnt den Abdruck nehmen.
- Spritze und unbenutztes Retrax® Gel AS entsorgen.

Die Spritzen und Spitzen/Kanülen sind für den Einmalgebrauch bestimmt und dürfen nicht autoklaviert werden.

Die SDS-Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Unternehmens unter pascaldental.com, oder wenden Sie sich direkt an Pascal.

Retrax® Gel AS und Retrax® Gel AS Clear von Pascal sind gluten-, soja-, milch-, ei-, erdnussfrei und frei von Baumstammprodukten.

Retrax® Gel AS / Retrax® Gel AS Clear

Ogni siringa monouso da 0,75 grammi contiene gel di solfato di alluminio al 25%

IT

Indicazioni per l'uso

Il Retrax® Gel AS/Retrax® Gel AS Clear è concepito per l'uso con tutti i tipi di filo per retrazione per assistere nell'emostasi e nella retrazione gengivale. Il Retrax® Gel AS/Retrax® Gel AS Clear facilita lo zeppamento del filo in quanto offre lubrificazione durante tale operazione, permettendo al filo di scivolare nel sotto. Il Retrax® Gel AS/Retrax® Gel AS Clear può essere usato anche durante qualsiasi procedura di restauro in cui siano indicate l'emostasi e la retrazione gengivale.