

Anlage 8

NL

ik en bevat 25% aluminiumsulfatgel

oorten retractiedraad als hulp bij  
in van afdrukken.  
auratie indien tandvreesretractie en  
de tandarts. Iedere vulling is bedeld voor eenmalig  
st alle medische en gewone draden van

ruek in de mond. Niet inslikken. Buiten het bereik van

ijn of haar praktijk  
voor aluminiumsulfat  
smaakstoffen; verifieer of de patiënt geen bekende  
lijk inslikken te voorkomen.

oedstelping te verwezenlijken en te behouden. Bij  
bruik toereikend moeten zijn voor de behandeling

or voorgevulde vullingen inbrengen.  
gen.  
à 6 minuten.  
sten en opnieuw gel aanbrengen. Wacht

tats van aanbrenging drogen.

lig gebruik en mogen niet in autoclaaf worden

n het bedrijf, pascidental.com, of neem direct

o voor de patiënt op letsel of infectie  
producten van soja, melk, eieren.

DE

### Retrax® Gel AS

Jede Kartusche mit 0,32 g für den Einmalgebrauch enthält 25 % Aluminiumsulfatgel

#### Indikationen zur Verwendung:

Retrax® Gel AS ist für den Gebrauch mit allen Arten von Retraktionsfäden zur Unterstützung der Gingivaretraktion and Hämostase in Zusammenhang mit Dentalabdruckverfahren bestimmt. Retrax® Gel AS Clear kann auch während der Restauration verwendet werden, wenn eine Gingivaretraktion und Hämostase indiziert sind. Dieses Produkt ist nur zur äußeren Anwendung in der Praxis gedacht. Jede Kartusche ist für den Einmalgebrauch bestimmt. Retrax® Gel AS ist mit allen medikamentösen und nicht-medikamentösen Fäden von Pascal kompatibel.

**Kontraindikationen:** Keine bekannt.

**Warnhinweise:** Nur zur intraoralen, äußeren Anwendung. Nicht schlucken. Von Kindern fern halten.

#### Vorsichtshinweise:

- Nur für den professionellen Gebrauch in der Praxis
- Nicht bei Patienten verwenden, die gegen Aluminiumsulfat allergisch sind.
- Gel Cord enthält künstliche Farben und Aromen, stellen Sie sicher, dass keine bekannten Patientenallergien vorhanden sind.
- Um ein mögliches Verschlucken zu verhindern, wird ein hohes Ansaugvolumen empfohlen.

**Dosierung:** Nach Bedarf verwenden, um eine Hämostase zu erzielen und aufrechtzuerhalten. Bei normalem Gebrauch sollte jede Kartusche für den Einmalgebrauch für eine Applikationsstelle ausreichend sein.

#### Gebrauchsanweisung:

- Die Schutzülle aus Kunststoff entfernen.
- Die Kartusche in eine Standardspritze oder Pistole einführen, die für vorgefüllte Kartuschen bestimmt ist.
- Vorsichtig einen dünnen Getropfen direkt auf den Sulcusbereich aufbringen.
- Einen Faden auswählen und in Gel tränken, 2 - 6 Minuten warten.
- Wenn die Blutung nicht zum Stillstand kommt, den Bereich spülen und wieder Gel auftragen.
- Faden entfernen.
- Zur Erzielung der besten Ergebnisse die Applikationsstelle gründlich spülen und trocknen.
- Wie gewohnt den Abdruck nehmen.
- Kartusche und unbenutztes Retrax® Gel AS entsorgen.

Die Kartuschen werden nur für den Einmalgebrauch empfohlen und sollten nicht autoklaviert werden.

Die MSDS-Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Unternehmens unter pascidental.com, oder wenden Sie sich direkt an Pascal.

Bei Wiederverwendung des Zylinders/der Spritze besteht eine erhöhte Verletzungs-/Infektionsgefahr für den Patienten.

Retrax® Gel AS von Pascal sind gluten-, soja-, milch-, ei-, erdnussfrei und frei von Baumstammprodukten.