

## Anwendung der GingiTrac

**1**

Den Zahn wie gewohnt präparieren.

**2**

Bei starker Blutung ein hämostatisches/adstringierendes Mittel einsetzen.

**3**

Einzelzahn-Präparation: Die GingiCap in der richtigen Größe auswählen und weiter zu Schritt 5.

**4**

Präparation von mehreren Zähnen:

GingiTrac ohne die Mischkanüle ausdrücken, um sicherzustellen, dass sowohl das Katalysator- als auch das Basismaterial gleichmäßig gefördert werden. Dann die Mischkanüle aufsetzen.

GingiTrac auf einen Kunststofflöffel ausdrücken und auf die präparierten Zähne platzieren. Auf der anderen Seite ein Watteröllchen platzieren, um ein vollständiges Schließen zu vermeiden. Das mittelvisköse Material bindet in 30 Sekunden ab. Aus dem Mund entfernen, spülen und trocknen.

**5**

Die Mischkanüle auf die GingiTrac-Kartusche aufsetzen, eine „erbsengroße“ Menge ausdrücken und entsorgen. Dies soll sicherstellen, dass sich Katalysator und Basis gründlich vermischen.

**6**

Füllen Sie die GingiCap oder die Access Blue Abformung mit GingiTrac Retraktionsmaterial. Die gefüllte GingiCap sollte nicht länger als 1:30 min. bei Raumtemperatur belassen bleiben, ansonsten härtet das Material aus.

**7**

Spritzen Sie das GingiTrac Retraktionsmaterial mit den beiliegenden Aufsätzen direkt um die Präparationsgrenze.

**8**

Platzieren Sie die GingiCap über die Präparation.

**9**

Lassen Sie den Patienten fest, aber nicht mit übermäßigem Druck zubeißen. Warten Sie abhängig von der Stärke der Blutungen und des Sekretflusses 2 Minuten bis zur kompletten Aushärtung und Retraktion.

**10**

Entfernen Sie das abgebundene GingiTrac. Prüfen Sie, ob das Zahnfleisch komplett retrahiert ist. Falls nötig, wiederholen Sie die Schritte 6-9.

**11**

Wenn erforderlich, die präparierten Zähne sanft abspülen und trocknen. Jetzt können Sie Ihre normale Abformung nehmen.

## Anwendung der GingiTrac MiniMix

**1**

Den Zahn wie gewohnt präparieren.

**2**

Bei starker Blutung ein hämostatisches/adstringierendes Mittel einsetzen.

**3**

Wählen Sie die geeignete Größe einer GingiCap aus

**4**

Befestigen Sie die Mischkanüle auf der GingiTrac MiniMix Karpule.

**5**

Laden Sie die MiniMix in die Snub Nose Snap-Fit Pistole.

**6**

Drücken Sie eine „erbsengroße“ Menge aus und entsorgen Sie sie. Dies soll sicherstellen, dass sich Katalysator und Basis gründlich und zu gleichen Teilen vermischen.

**7**

Füllen Sie die GingiCap mit GingiTrac Retraktionsmaterial. Lassen Sie die gefüllte GingiCap nicht länger als 1 Minute 30 Sekunden bei Raumtemperatur stehen, da sonst das Material aushärtet.

**8**

Spritzen Sie GingiTrac Retraktionsmaterial mit den beiliegenden MiniMIX Mischdüsen direkt um die Präparationsgrenzen.

**9**

Entfernen Sie das abgebundene GingiTrac. Platzieren Sie die GingiCap über die Präparation.

**10**

Lassen Sie den Patienten fest, aber nicht mit übermäßigen Druck zubeißen. Warten Sie abhängig von der Stärke der Blutungen und der Sickerflüssigkeit 2 Minuten bis zur kompletten Aushärtung und Retraktion.

**11**

Entfernen Sie das abgebundene GingiTrac. Prüfen Sie, ob das Zahnfleisch komplett retrahiert ist. Falls nötig, wiederholen Sie die Schritte 7-10.

**12**

Wenn erforderlich, die präparierten Zähne sanft abspülen und trocknen. Jetzt können Sie Ihre normale Abformung nehmen.