

Gebrauchsanweisung

1

Einfach mit dem Hochvolumen-Absauger verbinden (evtl. Adapter nötig), Nadel biegen und absaugen.

2

Benutzen Sie eine Papierspitze, um zu überprüfen ob der Bereich trocken ist. Wenn nicht saugen Sie weiter.

3

Wenn der Bereich trocken ist. Entfernen Sie den Absaugaufsatz und entsorgen Sie ihn fachgerecht.

4

Anmerkung: Feste Substanzen oder hoch visköse Flüssigkeiten gelangen eventuell nicht durch den MicroAspirator. Durch den transparenten Absaugkörper können Sie überprüfen ob abgesaugt wird.