

Anwendung

1

Den präparierten Zahn feucht belassen. Nicht trocknen.

2

Innenflächen und Ränder der trockenen Restauration leicht mit NoMIX® provisorischem Zement beschichten.

3

Die Krone einsetzen und ihre Passform überprüfen. Der Patient kann den Mund nun schließen.

4

5 Minuten warten. Der Zement ist nun ausreichend abgebunden, so dass überschüssiger Zement vorsichtig entfernt werden kann. Gründlich mit Wasser ausspülen. Gegebenenfalls die interproximalen Bereiche durch Hindurchziehen (nicht Aufwärtsziehen) verknoteter Zahnseide reinigen.

5

Der Zement ist nach ungefähr 15 Minuten vollständig abgebunden. Es wird empfohlen, den Patienten anzuweisen, mindestens 1 Stunde lang nicht zu essen.