

PREMISE *flowable*

Třísložkový kompozitní materiál

Přípravek Premise Flowable je hmota střední viskozity na bázi světlem tvrzeného pryskyřičného nanoplnidla, vhodná pro zubní náhrady třídy II (báze/podklad), III a V. Tento kompozitní materiál nabízí nový přístup k nanotechnologii: používá tři různá plnidla s tím, že výsledkem je tekutý, ale přesto tvárný materiál, který se nebortí. Další funkce zahrnují:

Lepení jamek a prasklin

Oprava vad skloviny

Oprava porcelánových náhrad

Tvorba menších uzávěrových výstupků v oblastech, které nejsou vystaveny tlaku

Incizální opotřebení

Návod k použití

1. Izolujte oblast s použitím suchého přípravku KerrHawe OptiDam.
2. Aplikujte přípravek OptiBond Solo Plus buď kompletním leptáním nebo samoleptáním.
3. Zvolte vhodný odstín kompozita. Přímo do místa preparace oddíl osy a okraj dásní naneste vrstvu přípravku Premise Flowable. Hmotu roztírejte tak, aby zaplnila i rozhraní na okrajích a skryté části v místě preparace.
4. Jednotlivé vrstvy Premise Flowable by neměly být silnější než 2 mm. Po každé vrstvě proveďte tvrzení světlem. *
5. Stíracími pohyby umístěte kompozit do místa preparace tak, aby obrysy a okraje náhrady získaly požadovaný tvar.
6. Upravte povrch a vyleštěte prostřednictvím KerrHawe OptiDisc, Occlubrush nebo leštícího systému HiLuster.

Systém odstínů

Premise Flowable je k dispozici v 10ti odstínech, které odpovídají Premise Shade Guide (na základě systému Vita):

A1 – A2 – A3 – A3,5

B1 – B2 – C2

XL 1 – XL2

Universal Opaque (Univerzální krycí)

Poznámka:

1. Po každém použití koncovku tuby odstraňte, aby nedošlo k zatuhnutí pryskyřice v tubě.
2. Koncovky Premise Flowable jsou určeny pouze na jedno použití.

Skladovací podmínky:

Skladujte při pokojové teplotě.

***Doporučené doby tvrzení:**

L.E. Demetron II 5 sekund, L.E. Demetron I 10 sekund Optilux 501 v módu Boost 10 sekund, v módu Ramp 20 sekund nebo v mód Regular 20 sekund. U ostatních typů polymeračního světla dodržujte doporučení výrobce.

Upozornění:

Nezpolymerovaná metakrylátová pryskyřice může způsobit kontaktní dermatitidu a poškodit zubní dřeň. Zabraňte kontaktu s pokožkou, zrakem a měkkými tkáněmi. Zasažené místo důkladně omyjte vodou.

OMEZENÁ ZÁRUKA**OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI KERR**

Ústní či písemná odborná pomoc společnosti Kerr je určena jako pomoc zubním lékařům při použití produktů společnosti Kerr. Tato pomoc nepřesahuje omezenou záruku společnosti Kerr, ani nezbavuje zubního lékaře testování produktů společnosti Kerr za účelem určení jejich vhodnosti pro zamýšlené použití a postupy. Zubní lékař přebírá veškeré riziko a odpovědnost za poškození vzniklé z nevhodného použití produktu společnosti Kerr.

V případě vady materiálu nebo zpracování se odpovědnost společnosti Kerr omezuje, podle volby společnosti Kerr, na výměnu vadného produktu či jeho části nebo nahrazení skutečných vlastních nákladů na vadný produkt. Vadný produkt musí být vrácen společnosti Kerr, aby mohlo být využito této omezené záruky. V žádném případě není společnost Kerr odpovědná za jakoukoli nepřímou, náhodnou či následnou škodu.

S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ STANOVENÉHO VÝŠE NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI KERR, VÝSLOVNĚ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK S OHLEDEM NA POPIS, JAKOST NEBO VHODNOST PRO PŘÍSLUŠNÝ ÚČEL.