

Papierspitzen

Anwendungsbereich

Papierspitzen sind feine, sich verjüngende, den Öffnungen der Wurzelkanäle angepasste Spitzen aus saugfähigem Papier. Sie dienen bei der Zahnbehandlung in der Wurzelkanalbehandlung zum Trocknen der Kanäle.

Anwendung

Mit desinfizierenden Spüllösungen werden die Kanäle durch den Zahnarzt bei der Wurzelbehandlung gereinigt und anschließend mit Papierspitzen getrocknet. Durch die Wahl unterschiedlicher Stärken der Papierspitzen (welche nach ISO-Standard aufgebaut bzw. eingefärbt sind) kann der Zahnarzt die Stärke aussuchen und einführen, die ihm den schnellsten und sichersten Behandlungserfolg gewährleistet.

Eigenschaften

- Erfüllung der Anforderungen nach der Norm ISO 7551
- Konisch zulaufend, 28 mm Gesamtlänge
- Durchgängig glatte, flusenfreie Oberfläche für leichtes Eindringen und entlanggleiten am Gewebe
- Steif und straff gerollt, dennoch flexibel
- Besonders saugfähiges weißes Papier
- Keine weiteren Additive

Lieferform

Weißes Papierspitzen

REF 931.1 ISO 15-40 (Packung mit 200 stk)

REF 931.2 ISO 45-80 (Packung mit 120 stk)

REF 931.5 ISO 90-140 (Packung mit 120 stk)

REF 932.3 ISO 15-40 (Packung mit 500 stk)

REF 932.4 ISO 45-80 (Packung mit 300 stk)

Farbige Papierspitzen

REF 930.1 ISO 15-40 (Packung mit 200 stk)

REF 930.2 ISO 45-80 (Packung mit 120 stk)

REF 933.1 ISO 15-40 (Packung mit 500 stk)

REF 933.2 ISO 45-80 (Packung mit 300 stk)

Safety Color Papierspitzen

REF 937.1 ISO 15-40 (Packung mit 200 stk)

REF 937.2 ISO 45-80 (Packung mit 120 stk)

Greater Taper Papierspitzen (Packung mit 60 stk)

REF 948.1 ISO 15-40 (GT 04)

REF 949.1 ISO 15-40 (GT 06)



Zusammensetzung

- Weißes, spezialangefertigtes Papier in einer Stärke von 0,0005 mm
- Farbpigmente

Haltbarkeit

60 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 6,
EG Zertifikat: HD 601390530001,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Nürnberg

Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax.: +49 781 60586-40
Germany
www.becht-online.de