



1. Generale:

1.1. Articolo e

1.2. Quantità di consegna:

PRECI TRAY basi in resina fotopolimerizzabili 50 pz.

- colore rosa **art. 890-1000**
- colore blu **art. 890-1010**
- colore bianco **art. 890-1020**

1.3. Indirizzo del produttore: YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen Telefono:0049-7733-94 10 11 o 94100 Telefax:0049-7733-9410 22

1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

- tenere a temperatura sotto 20°C
- proteggere dai raggi solari, tenendo il materiale sempre ben chiuso nella sua scatola nera
- tenere in un luogo sicuro, protetto da colpi, da cadute accidentali e da eventuali altri possibili danni

2. Uso secondo le norme:

PRECI TRAY basi in resina, vengono utilizzati per portaimpronta individuali. Il processo di adattamento e di polimerizzazione va eseguito solo con strumenti adatte e da personale qualificato e adeguatamente istruito **comunque sempre al di fuori del cavo orale del paziente**. Per la rilevazione dell'impronta immettere nel cavo orale solo un cucchiaino perfettamente fotopolimerizzato e di dimensioni tali da evitare che possano essere ingoiato e provocare asfissia.

Da un utilizzo contro tali norme scadono sia la garanzia che qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.

3. Rischi e pericoli durante l'utilizzo:

- Fare attenzione che persone incompetenti (per esempio bambini) non utilizzino e / o possano venire a contatto con il materiale (rischio di deglutizione)
- Il materiale fotopolimerizzato è da immettere nella cavo orale solo per breve tempo e non in modo molto prolungato o permanente.

4 Istruzioni d' uso:

4.1. Preparazione: Aprire la scatola nella apertura prevista, prelevare una base e richiudere subito la scatola

4.2. Utilizzo:

- Togliere i fogli protettivi dalla placca, adattare la stessa sul modello e tagliare ai bordi. Formare il manico con il materiale eccedente. Polimerizzare il cucchiaino ottenuto nell'apparecchio per fotopolimerizzazione. Dopodiché togliere il cucchiaino dal modello e polimerizzare la parte interna (che era prima a contatto con il modello in gesso) per un identico periodo. Lo strato appiccicoso in superficie è facilmente eliminabile sotto l'acqua corrente o con un detergente alcoolico che sia comunque ammesso per l'igiene del paziente.

5. Eliminazione: Per l'eliminazione del materiale seguire la normativa vigente.

6. Durata: È consigliabile utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla data di apertura dello imballo originale.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	02.07.1997/TB	25.03.2019/CJ	1	25.03.2019/TB	Seite 1 von 1