

Retrax® Gel FS de Pascal ne contient pas de gluten, soja, lait, œufs, ni produits à cacahuètes et noix. Retrax® Gel FS ne contient aucun arôme ou couleur artificiels.

**Retrax® Gel FS**

Jede Einmal-Spritze enthält 0,75 g mit 15,5 %igem Eisensulfatgel.

DE

**Indikationen zur Verwendung:**

Retrax® Gel FS ist zur Unterstützung der Gingivaretraktion und zur Unterdrückung von starken Kapillarblutungen in Zusammenhang mit Abformungen sowie für Gewebemanagementprobleme in anderen Phasen der Zahnbehandlung bestimmt. Dieses Produkt ist nur zur äußeren Anwendung gedacht. Jede Spritze ist für den Einmalgebrauch bestimmt. Retrax® Gel FS ist mit Ausnahme von Materialien, die Epinephrin oder Aluminiumchlorid enthalten, mit allen Arten von Retraktionsmaterialien kompatibel.

**Kontraindikationen:** Keine bekannt.

**Warnhinweise:** Nur zur örtlichen intraoralen Anwendung. Nicht schlucken. Von Kindern fern halten.

**Vorsichtshinweise:**

- Nur für den professionellen Gebrauch in der Praxis.
- Nicht bei Patienten verwenden, die gegen Eisensulfat allergisch sind.
- Retrax® Gel FS nicht mit Produkten verwenden, die Epinephrin enthalten.
- Es kann zu einer vorübergehenden Gewebeerfärbung kommen. Diese Verfärbung sollte nicht länger als 24 - 48 Stunden anhalten.
- Um ein mögliches Verschlucken zu verhindern, wird ein hohes Ansaugvolumen empfohlen.
- Eine Wiederverwendung der Spritze setzt die Patienten einem erhöhten Verletzungs- oder Infektionsrisiko aus.

**Dosierung:** Nach Bedarf verwenden, um eine Hämostase zu erzielen und aufrechtzuerhalten. Bei normalem Gebrauch sollten mit jeder Einmal-Spritze bis zu zwei Applikationsstellen behandelt werden können.

**Gebrauchsanweisung:**

- Die mit 0,75 g vorgefüllte Spritze sollte zusammen mit einer Einwegapplikationskanüle oder einer MicroFuser™-Spritze verwendet werden.
- Die Spritzenkappe entfernen und die Applikationsspitze aufsetzen.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen Spritzenkolben vor der erstmaligen Verwendung leicht herausziehen.
- Vorsichtig einen dünnen Geltröpfen im Sulcusbereich applizieren.
- Einen Faden auswählen und in das Gel legen. Anschließend 1 - 3 Minuten warten.
- Sollte die Blutung anhalten, den Bereich spülen und erneut Gel auftragen.
- Anschließend wieder 1 - 3 Minuten warten.
- Faden entfernen.
- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse die Applikationsstelle gründlich spülen und trocknen.
- Wie gewohnt den Abdruck nehmen.
- Spritze und unbenutztes Retrax® Gel FS entsorgen.

Die Spritzen und Kanülen/Spitzen sind für den Einmalgebrauch bestimmt und dürfen nicht autoklaviert werden.

Die SDS-Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Unternehmens unter [pascaldental.com](http://pascaldental.com), oder wenden Sie sich direkt an Pascal.

Das Retrax® Gel FS von Pascal ist gluten-, soja-, milch-, ei-, erdnussfrei und frei von Baumnussprodukten. Retrax® Gel FS enthält keine künstlichen Farben oder Aromen.

**Retrax® Gel FS**

Ogni siringa monouso da 0,75 grammi contiene gel di solfato ferrico al 15,5%

IT

**Indicazioni per l'uso**