

SULK® II
Retraktionspaste
CE

Gebrauchsinformation

Anwendungsgebiete

SULK® II ist ein Retraktionsmittel zur Sulkuserweiterung. **SULK® II** wirkt adstringierend auf die Gingiva.

Indikation

Zur vorübergehenden marginalen Gingivaretraktion und Trockenlegung des Sulkus bei gesundem Parodont.

Kontraindikation

SULK® II enthält Kaolin und Aluminiumchlorid. Bei Patienten mit einer Überempfindlichkeit gegenüber Kaolin und Aluminiumchlorid die Paste nicht anwenden.

Nicht anwenden bei exponiertem Knochen, fortgeschrittenen Parodontopathien oder freiliegenden Furkationen.

Gebrauchsanweisung

1. Zahn wie erforderlich präparieren.
2. Die Compute in einen geeigneten Dispenser einsetzen.
3. Spitze der Compute bei Bedarf in erforderliche Position biegen.
4. Eine geringe Menge der Paste auf einen Mischblock ausbringen und verwerfen.
5. Optional: falls es die klinische Situation erfordert, einen Retraktionsfaden in den Sulkus einlegen.
6. Den Sulkus mit Wasser spülen und trocknen.
7. Paste langsam um die Präparation herum in den Sulkus applizieren, bis der Sulkus vollständig gefüllt ist. Bei Bedarf Kompressionskappen, -hüte oder andere Kompressionsprodukte benutzen.
8. Paste ca. 2 Minuten einwirken lassen, um die Gingivaretraktion zu ermöglichen. Während der Einwirkzeit den behandelten Bereich unbedingt trocken halten.

Vorsicht:

Lange Verweildauer der Paste im Mund kann zu Irritationen der Gingiva führen. Mundverweildauer nicht überschreiten.

9. Paste mit einem Wasser/Luft-Gemisch und Absauger vollständig aus dem Sulkus und Mundbereich entfernen.

Hinweis:

Paste vollständig entfernen.

10. Reste der Paste können zu Ungenauigkeiten oder zu Verzögerung der Abbindung des Abformmaterials führen. Gingiva mit Luft trocknen und das Retraktionsergebnis kontrollieren. Falls eine stärkere Retraktion gewünscht ist, den Vorgang ab Schritt 7 wiederholen. Ggf. zusätzlich einen dünnen Retraktionsfaden verwenden.
11. Abformung erstellen.

Bitte wenden

Technische Daten

Einwirkzeit = 2 Minuten

Zusammensetzung

Kaolin, Aluminiumchlorid, Hexahydrat, Wasser, Farbpigmente, Aroma

Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen ist eine Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials nicht auszuschließen.

Lagerung / Haltbarkeit / Zusammensetzung / Handelsform

- Bei Temperaturen im Bereich zwischen 15 °C und 25 °C / 59 °F und 77 °F lagern.
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.
- Die Compule nach Öffnen des Aluminiumbeutels sofort verwenden. Reste in der Compule verwerfen.
- Art.- Nr.6300-200 Inhalt:10 x 0,37 g Compuhlen

Besondere Hinweise

Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augenkontakts sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.

Paste nicht verschlucken! Im Falle eines unbeabsichtigten Verschluckens gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.

MSDS # 7400

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

SULK II 2020 / Stand: 04.03.2020

Indigodental GmbH, Fahltskamp 5, 26421 Pinneberg, Germany
Vertrieb: BonaDent GmbH, Berner Str. 28, 60437 Frankfurt, Germany
Tel: 069-586 07 39 0, Fax: 069-586 07 39 31, Internet: www.bonadent.de,
E-Mail: bonadent@t-online.de

CE 0482



SULK® II ist eine Handelsmarke der Firma BonaDent GmbH