


TR Dosiergerät TR dosing device

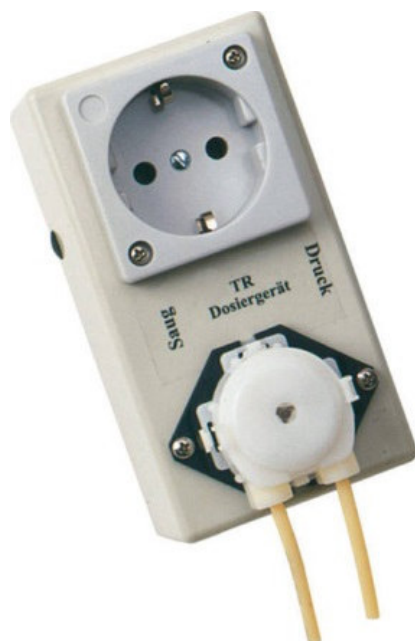

Gebrauchsanweisung
Instruction for use



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma BDT entschieden haben.

Damit Sie dieses Produkt sicher und einfach zum größtmöglichen Nutzen für sich einsetzen können, muss diese Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen und beachtet werden.

In einer Gebrauchsanweisung können nicht alle Gegebenheiten einer möglichen Anwendung beschrieben werden. Deshalb steht Ihnen unsere Hotline gerne für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklungen unserer Produkte empfehlen wir Ihnen auch bei häufiger Verwendung des gleichen Produktes immer wieder das aufmerksame Durchlesen der jeweils aktuell beiliegenden bzw. im Internet unter www.bdt-dental.de hinterlegten Gebrauchsanweisung

Hersteller

BDT GmbH • Industriestr. 27 • 77656 Offenburg • Deutschland

Telefon +49 781/58 688

Fax +49 781/58 664

E-Mail info@bdt-dental.de

Qualitätshinweise

BDT versichert dem Anwender eine einwandfreie Qualität der Produkte. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung beruht auf eigener Erfahrung. Der Anwender ist für die Verarbeitung der Produkte selbst verantwortlich. In Ermangelung einer Einflussnahme von BDT auf die Verarbeitung durch den Anwender besteht keine Haftung für fehlerhafte Ergebnisse.



Gebrauchsanweisung

TR Dosiergerät

Artikelnr. 20151

1. Sicherheitshinweise

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das TR Dosiergerät ist ausschließlich zum zu dosieren von Dentaflor (Flockungsmittel) in zahntechnischen/ kieferorthopädischen Labor bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten aller Hinweise aus der Gebrauchsanweisung.

Bei der endgültigen Außerbetriebnahmen des BDT-Gerätes sind die entsprechenden landesspezifischen Vorschriften einzuhalten. Fragen zur sachgerechten Entsorgung des Gerätes beantwortet BDT oder der dentale Fachhandel.

2. Symbole und Kennzeichnung von Gefahrenquellen

In der Gebrauchsanweisung werden folgende Zeichen für Gefährdungen verwendet:



Warnung

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge haben



Vorsicht

Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen zur Sicherheit hin. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann die Sicherheit Ihres Gerätes und / oder das Eigentum anderer in Gefahr bringen.

3. Entsorgung



Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsbedarf entsorgt werden soll. Der Gesetzgeber verwehrt gewerblichen Kunden die Rückgabe von Altgeräten über kommunale Sammelstellen. Nähere Informationen erhalten Sie von BDT oder dem dentalen Fachhandel.

2. Technische Daten

Netzanschluss	220 V	50/60 Hz
Nennleistung	20 W	
Abmessungen (BxHxT)	120x66x90mm	
Gewicht	0,7 Kg	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP 21	
Last	min. 300 W / max. 3600 W	
Temperaturbereich	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)	
Nutzung	nur in innenliegenden Räumen	
Höhe über Meeresspiegel	max. 1500 m ü. NN	
Luftfeuchtigkeit	10%-80%, nicht kondensierend	

3. CE-Konformitätserklärung

Mit der auf dem Typenschild angebrachten CE-Kennzeichnung bestätigen wir die Einhaltung der EMV-Richtlinien der EWG 89/336/EWG, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und CE-Kennzeichnungspflichtrichtlinie 93/68/EWG.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit und die Gewährleistung erlischt.

4. Inbetriebnahme des TR Dosiergerät

Falls Sie, wider Erwarten, einen Transportschaden an Ihrem Gerät feststellen sollten, benachrichtigen Sie sofort die Firma BDT oder den Fachhändler, über den Sie das Gerät bezogen haben.



Achten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme darauf, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild (Geräterückwand) angegebenen Betriebsspannung übereinstimmt.

Vor der Inbetriebnahme des TR Dosiergerätes entfernen Sie den Netzstecker des Gipstrimmers aus der Schutzkontaktsteckdose.

Platzieren Sie nun das TR Dosiergerät in der freien Schutzkontaktsteckdose. Nehmen Sie den Netzstecker des Gipstrimmers und stecken den Stecker in die Schutzkontaktsteckdosen im TR Dosiergerät.

Nun wird das TR Dosiergerät automatisch Dentaflor zu dosieren, sobald der Gipstrimmer eingeschaltet wird.

Stellen Sie nun an einem beliebigen Ort das Flockungsmittel auf und entfernen den Verschluss.

Schrauben Sie nun den beigelegten Verschluss mit der Leitung wieder auf und führen die Leitung bis zum Boden des Kanisters.

Kürzen Sie den Schlauch auf die erforderliche Länge und verbinden den Schlauch mit dem TR Dosiergerät „Saug“.


Verbinden Sie den restlichen Schlauch mit dem Anschluss „Druck“ und führen diesen zum Auslauf des Gipstrimmers bzw. in das Ausgussbecken oder direkt in den Gipsabscheider.

Zum Einstellen der optimalen Dosiermenge wird die Verschlusskappe auf der linken Seite des TR Dosiergerätes entfernt.

Mit einem geeigneten Schraubendreher kann nun die Dosiermenge verändert werden (0,4 - 1,0 L/h).



Entfernen Sie zuvor das Dosiergerät auf der Schutzkontaktsteckdose!

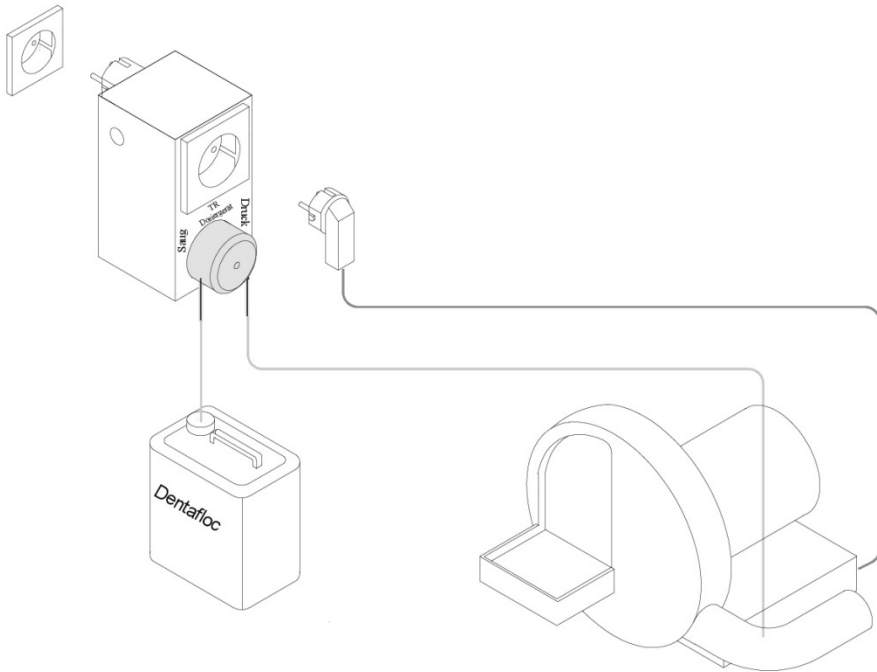

5. Wartung und Pflege

Das TR Dosiergerät ist wartungsfrei.