

Nämä käyttöohjeet viittaavat seuraaviin artikkeleihin:

TOP Line					
REF	70100	70101	70102	70103	70104
Koko	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Mitat	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Pakkausyksikkö	100 kpl.	100 kpl.	300 kpl.	100 kpl.	100 kpl.

Trend Line					
REF	70400	70401	70402	70403	70404
Koko	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Mitat	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Pakkausyksikkö	100 kpl.	100 kpl.	300 kpl.	100 kpl.	100 kpl.

Standard Line					
REF	70100A	70101A	70102A	70103A	70104A
Koko	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Mitat	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Pakkausyksikkö	100 kpl.	100 kpl.	300 kpl.	100 kpl.	100 kpl.

TAB Line					
REF	70500	70501	70502	70503	70504
Koko	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Mitat	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Pakkausyksikkö	100 kpl.	100 kpl.	300 kpl.	100 kpl.	100 kpl.

Plus Line				
REF	70600	70601	70602	70603
Koko	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -
Mitat	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm
Pakkausyksikkö	100 kpl.	100 kpl.	300 kpl.	100 kpl.

- 1** Käännä kieleke eteenpäin
- 2** Aseta fosforilevy suojakoteloon
- 3** Irrota valkoinen kaistale
- 4** Käännä kieleke takaisin ja paina tiukasti
- 5** Epäaktiivisen puolen on osoitettava röntgenlaitetta kohti
- 6** Avaa suojuori irrottamalla ylä- tai alaliuska
- 7** Hävitä asianmukaisesti käytön jälkeen

REF	NPRHB0, NPRHB1, NPRHB2, NPRHB3, NPRHB5	706310, 706311, 706312
	QWU000, QWU001, QWU002, QWU003, QWU004	7302, 7303, 7304, 7305, 7306
	209635, 209636, 209637, 209638, 209639, 235952, 235953	88200, 88201, 88202, 88203, 88204
	322955, 322960, 351990, 351995, 353785, 353790	960002, 960003, 960004, 960005
	6074301, 6074302, 6074303, 6074308, 6074312	

Käyttötarkoitus

Kuvantamislevyn suojahylsy ovat kertakäyttöisiä muovihylsyjä, jotka on suunniteltu suojaamaan potilasta kuvantamislevyn hiukkaskontaminaatiolta, estämään potilaiden välistä ristikontaminaatiota ja suojaamaan (valolta, pölyltä, lialta, fyysiseltä vahingoittumiselta) suun sisäisiä kuvantamislevyjä digitaalisissa hammasröntgenkuvauksissa. Suojahylsyjä on saatavana 5 kokoa (0, 1, 2, 3, 4), ja ne ovat yhteensopivia markkinoiden yleisimpien kuvantamislevykokojen kanssa.

Suoritustiedot

Suojahylsy on valmistettu lateksittomasta, hajuttomasta muovista, ja materiaali on testattu mahdollisen ihoallergian varalta.










Suojahylsyjä voidaan käyttää kuvantamisen, varastoinnin ja skannauksen aikana hyvän kuvanlaadun varmistamiseksi ja kuvantamislevyjen käyttöien pidentämiseksi.

Kertakäyttöinen suojahylsy on tarkoitettu tukemaan hammashygieniatoinenpiteitä, mutta se ei korvaa valmistajan määräyksiä uudelleenkäytettävien intraoraalisten kuvantamislevyjen desinfiointista tai steriloinnista.

Huomautuksia tuotteen turvallisesta käytöstä*

- Lääkinnällistä laitetta saa käyttää vain (koulutettu) hammashoitohenkilökunta.
- Kuvantamislevyjen suojakuorta saa käyttää vain uusien kertakäyttökäsineiden kanssa, mikä estää ristikontaminaation.
- Käytä uutta suojahylsyä joka kerta, kun käytät kuvantamislevyä.
- Käytä vain kuvantamislevyihin sopivia suojahylsyjä (koko 0, 1, 2, 3, 4).
- Suojahylsy on kertakäyttöisiä, eikä niitä saa missään tapauksessa käyttää uudelleen. Ristikontaminaatiota potilaiden välillä voi esiintyä, kun potilaita käytetään useita kertoja, mikä voi johtaa infektiin.
- Hävitä suojakuori jokaisen potilaan/käytön jälkeen.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta suojakotelo.
- Helppo levitys ja poisto kuten kuvissa on esitetty. Ergonomisesti muotoillut suojakotelot ja tarrakieleke, jossa on tukevat pahviset peitelikat, mahdollistavat kuvantamislevyn helpon avaamisen ja yksinkertaisen asettamisen paikalleen.

Kaikista tuotteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja maanne toimivaltaiselle viranomaiselle.

Luettelo MGKin terveydenhuollon laitteiden pakkauksissa ja merkinnöissä toistuvista symboleista. EU:n lääkinnällisten laitteiden standardin DIN EN ISO 15223-1:2017-04 mukaisesti			
	Tutustu käyttöohjeisiin	REF	Luettelo- tai mallinumero
	Ei saa käyttää uudelleen	LOT	Eränumero
	Steriloimaton	MD	Lääkinnällisellä laitteella
	Pidä auringonvalolta suojattuna	UDI	Yksilöllisellä laitetunnisteella
	Pidä kuivana		Pakkausyksikön laatikoiden lukumäärä
	Viimeinen käyttöpäivä		Kuvantamislevyjen suojahylsyjen lukumäärä laatikkoa kohti
	Säilytyslämpötila-alue	CE	CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä
	Valmistaja		

*Kirjallisuus: ¹Infectionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene1 - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>
²Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011

