

Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się do następujących artykułów:

TOP Line					
REF	70100	70101	70102	70103	70104
Rozmiar	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Wymiary	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Jednostka opakowaniowa	100 sztuk	100 sztuk	300 sztuk	100 sztuk	100 sztuk

Trend Line					
REF	70400	70401	70402	70403	70404
Rozmiar	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Wymiary	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Jednostka opakowaniowa	100 sztuk	100 sztuk	300 sztuk	100 sztuk	100 sztuk

Standard Line					
REF	70100A	70101A	70102A	70103A	70104A
Rozmiar	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Wymiary	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Jednostka opakowaniowa	100 sztuk	100 sztuk	300 sztuk	100 sztuk	100 sztuk

TAB Line					
REF	70500	70501	70502	70503	70504
Rozmiar	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Wymiary	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Jednostka opakowaniowa	100 sztuk	100 sztuk	300 sztuk	100 sztuk	100 sztuk

Plus Line				
REF	70600	70601	70602	70603
Rozmiar	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -
Wymiary	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm
Jednostka opakowaniowa	100 sztuk	100 sztuk	300 sztuk	100 sztuk

- 1 Odwróć zakładkę do przodu
- 2 Włóż płytkę fosforową do osłony ochronnej
- 3 Odkleń biały pasek
- 4 Odwróć zakładkę i mocno dociśnij
- 5 Nieaktywna strona musi być skierowana w stronę urządzenia rentgenowskiego
- 6 Aby otworzyć kopertę ochronną, należy odkleić górny lub dolny pasek
- 7 Po użyciu zutylizować zgodnie z przepisami

REF	NPRHB0, NPRHB1, NPRHB2, NPRHB3, NPRHB5 QWU000, QWU001, QWU002, QWU003, QWU004 209635, 209636, 209637, 209638, 209639, 235952, 235953 322955, 322960, 351990, 351995, 353785, 353790 6074301, 6074302, 6074303, 6074308, 6074312	706310, 706311, 706312 7302, 7303, 7304, 7305, 7306 88200, 88201, 88202, 88203, 88204 960002, 960003, 960004, 960005
-----	---	---

Przewidziane zastosowanie

Rękawy ochronne do płytek obrazowych są jednorazowymi plastikowymi rękawami przeznaczonymi do ochrony pacjenta przed zanieczyszczeniem cząsteczkami z płytki obrazowej, do zapobiegania zanieczyszczeniu krzyżowemu między pacjentami oraz do ochrony (światło, kurz, brud, uszkodzenia fizyczne) płytek obrazowych wewnątrzustnych w cyfrowych radiografiach stomatologicznych. Rękawy ochronne są dostępne w 5 rozmiarach (0, 1, 2, 3, 4) i są kompatybilne z najbardziej popularnymi rozmiarami płytek obrazowych na rynku.

Dane dotyczące wydajności

Rękawy ochronne wykonane są z bezłatekowego, bezwonnego tworzywa sztucznego, a materiał został przetestowany pod kątem ewentualnej nietolerancji skórnej.











Rękawy ochronne mogą być stosowane podczas obrazowania, przechowywania i skanowania, aby zapewnić dobrą jakość obrazu i przedłużyć żywotność płyt obrazowych.

Jednorazowy rękaw ochronny jest przeznaczony do wspierania środków higieny stomatologicznej, ale nie zastępuje specyfikacji producenta dotyczących dezynfekcji lub sterylizacji płyt do obrazowania wewnątrzustnego wielokrotnego użytku.

Uwagi dotyczące bezpiecznego stosowania produktu*

- Wyrób medyczny może być używany wyłącznie przez (przeszkolony) personel stomatologiczny.
- Rękawy ochronne do płytek obrazowych powinny być używane wyłącznie z nowymi rękawiczkami jednorazowymi, co zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu.
- Przy każdym użyciu płytki do obrazowania należy użyć nowego rękawa ochronnego.
- Należy używać wyłącznie rękawów ochronnych (rozmiar 0, 1, 2, 3, 4), które pasują do płyt obrazowych.
- Rękawy ochronne są jednorazowego użytku i w żadnym wypadku nie mogą być ponownie użyte. Przy wielokrotnym użyciu może dojść do zanieczyszczenia krzyżowego między pacjentami, co może prowadzić do zakażenia.
- Wyrzucić rękaw ochronny po każdym pacjencie/użyciu.
- Nigdy nie używaj uszkodzonej osłony ochronnej.
- Łatwa aplikacja i demontaż, jak pokazano na ilustracjach na odwrocie. Ergonomicznie zaprojektowane tuleje ochronne i zakładka samoprzylepna z mocnymi kartonowymi paskami osłonowymi umożliwiają łatwe otwieranie i proste wkładanie płytki obrazowej.

Wszystkie poważne wypadki związane z produktem należy zgłaszać producentowi i właściwym władzom w danym kraju.

Oznaczenie symboli – Objaśnienie symboli stosowanych na opakowaniach i etykietach zgodnie z normą UE dotyczącą wyrobów medycznych DIN EN ISO 15223-1:2017-04			
	Zapoznać się z instrukcją obsługi	REF	Numer katalogowy
	Nie używać ponownie	LOT	Kod partii
	Niesterylne	MD	Wyrób medyczny
	Chronić przed światłem słonecznym	UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Chronić przed wilgocią		Liczba kartonów w jednostce opakowaniowej
	Data ważności		Liczba rękawów ochronnych na płytę obrazową w opakowaniu
	Limit temperatury	CE	Oznakowanie zgodności CE
	Producent		

*Literatura: ¹⁾Infectionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene1 - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>
²⁾Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011

