

Mit Exposé® ist kein Abmessen oder Anmischen erforderlich, und Sie müssen auch keinen Essig für unliebsame Zwischenfälle vorrätig haben.

Exposé ist ein Kariesindikator, der in ein Applikator- und Spendersystem integriert ist! Die Detektorlösung ist bereits auf unsere Benda®-Mikroapplikatoren aufgebracht. Exposé einfach durch Berühren einer feuchten Zahnoberfläche aufbringen, und Exposé färbt infiziertes Dentin an. Kein Entnehmen, kein Tropfen, kein Verschmutzen! Exposé beseitigt das lästige Verschmutzen durch Großbehälter oder Spritzen mit Pinselspitze. Wir von Centrix machen Zahnheilkunde einfacher.

- Keine Vorbereitung, kein Reinigen, und keine Kreuzkontamination
- Unterstützt die minimalinvasive Zahnheilkunde
- Lieferbar in zwei Applikatorgrößen
- In 2 Indikatorfarben erhältlich: Blau und Rot



Exposé ist in unserem Benda®Matic-Aufklappspender verpackt.

Bestellen ist einfach. Rufen Sie unter 0800 2368749 an oder kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler. Besuchen Sie centrixdental.de für weitere Informationen.










## **GEBRAUCHSANWEISUNG**

- 1) Entnehmen Sie einen Exposé-Applikator aus dem Benda®Matic-Spender.
- 2) Feuchten Sie den Exposé-Applikator mit Wasser oder einem feuchten Zahn leicht an.
- 3) Applizieren Sie den feuchten Exposé-Applikator auf den präparierten Zahn.
- 4) Spülen Sie und untersuchen Sie den Bereich auf Exposé-Rückstände, die auf dem betroffenen Dentin zurückgeblieben sind.
- 5) Fahren Sie wie gewohnt fort.



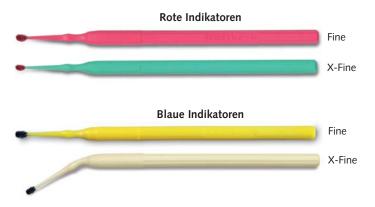

## **BESTELLINFORMATIONEN:**

Exposé	
--------	--

Art. Nr. 310322 Blauer Indikator 96 X-Fine und 96 Fine, jeweils in separaten BendaMatics

Art. Nr. 310325 Roter Indikator 96 X-Fine und 96 Fine, jeweils

in separaten BendaMatics

Exposé Refills

Art. Nr. 310330 Blauer Fine-Kariesindikator, Nachfüllpackung, 576 St. Art. Nr. 310331 Blauer X-Fine-Kariesindikator, Nachfüllpackung, 576 St. Art. Nr. 310332 Roter X-Fine-Kariesindikator, Nachfüllpackung, 576 St. Art. Nr. 310333 Roter Fine-Kariesindikator, Nachfüllpackung, 576 St.

## Die Bestellung ist einfach.

Rufen Sie uns gebührenfrei an: **0800 CENTRIX** (0800 2368749) Oder kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler.

Besuchen Sie centrixdental.de für weitere Informationen.



Macht Zahnheilkunde einfacher.<sup>sм</sup>

