

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] ontschuimer S

antschuimmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Klinische en industriële laboratoria, voedingsmiddelenindustrie, cosmetica-industrie.

Ook bij de reiniging/ desinfectie van OK-tafels

Ter voorkoming van schuimvorming in alkalische reinigungsoplossingen, die sterk vervuild zijn door vet, eiwit, zetmeel, suikerverontreiniging etc.

EIGENSCHAPPEN:

- Gebaseerd op geëmulgeerde siliconenolie.
- Al werkzaam bij lage temperatuur.
- Kan zowel in machinale voorreiniging als in de hoofdreiniging gebruikt worden.
- Met alle neodisher[®] reinigingsmiddelen te combineren.

DOSERING/GEBRUIK:

- **0,05- 0,1** ml/l (afhankelijk de schuimvormende verontreiniging)
dosereren via een geëigend doseerapparaat (of handmatig)

N.B.:

Vermijdt overdosering om aanhechting van siliconenresten op oppervlakken te voorkomen.

Niet vermengen met andere producten!

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verschijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	1,0 g/ cm ³
pH:	neutraal
Houdbaarheid:	12 maanden (zie opslagcondities!)

WERKZAME STOFFEN (conform richtlijn 89/542/EG):

- < 5% nietionische tenside

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] ontschuimer S

antischuimmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

OPSLAGCONDITIES:

Minimum / maximum temperatuur voor opslag: zie etiket. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:		-
Bijzondere gevaren:		-
Veiligheidsaanbevelingen:		-

CE-MARKERING:

Product is voorzien van een CE-markering conform de richtlijn 93/42/EWG voor medische producten.

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruiksoptelling:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
430148	10 x 1L

Versie: 13-09-2011 (vervangt versie: 06-04-2006)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl !

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.