




# neodisher® MediClean



## Reinigingsmiddel voor het voorbereiden van thermostabiele en thermolabele instrumenten

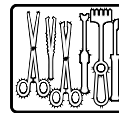

Vloeibaar concentraat

### Toepassingsgebied:

- Machinale en handmatige reiniging van medisch-technische hulpmiddelen, zoals chirurgische instrumenten, endoscopen, anesthesiehulpmiddelen en containers.

### Vermogensspectrum:

- Verwijdert op betrouwbare wijze resten van gedenatureerd, opgedroogd en door desinfecterende bestanddelen verhard bloed
- Geschikt voor instrumenten en hulpmiddelen van roestvrij staal, instrumentstaal en gebruikelijke kunststoffen, evenals materialen van optiek en anesthesiehulpmiddelen
- Geëloxeerd aluminium moet vooraf worden gecontroleerd op geschiktheid

### Bijzondere eigenschappen:

- Hoge reinigingsgraad
- Met zwakke alkalische en reinigingsondersteunende, schuimarme componenten.
- Bij machinale voorbereiding is geen neutralisatie vereist, waardoor de programmaduur wordt verkort

### Toepassing en dosering:

neodisher MediClean kan in reinigings- en desinfectieapparaten evenals in dompel- en ultrasoundbaden worden gebruikt. De hoeveelheid van de dosering is onder meer afhankelijk van het toepassingsbereik en de mate van vervuiling van de instrumenten. De volgende parameters worden bij het gebruik van neodisher MediClean aanbevolen:

Machinale reiniging van thermostabiele en thermolabele instrumenten	2 - 10 ml/l (0,2 - 1,0 %)*, bijv. 40 - 60 °C, 10 min
---	--

Machinale reiniging van flexibele endoscopen	5 ml/l (0,5 %), 35 - 55 °C, 3 - 10 min
Handmatige reiniging van thermostabiele en thermolabele instrumenten in een dompel- en ultrasoundbad	5 - 20 ml/l (0,5 - 2 %)*, max. 40 °C, 10 - 30 min
Handmatige reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische - toebehoren in een dompel- of ultrasoundbad	5 - 30 ml/l (0,5 - 3 %)*, max. 40 °C, 5 - 10 min

\* De hoeveelheid van de dosering is o.a. afhankelijk van de mate van vervuiling

Gebruik bij dosering passende doseertoestellen.

In zowel de reinigingsstap als de afsluitende spoeling wordt aanbevolen volledig onzilt water te gebruiken. Gebruik van volledig onzilt water tijdens de laatste spoeling voorkomt watervlekken en beschermt tevens geanodiseerd aluminium.

De bij klassieke, alkalische reinigers vereiste neutralisatiestap komt te vervallen. Bij het voorbereiden van ooginstrumenten wordt vóór de afsluitende spoeling een extra stap geadviseerd waarbij met water wordt gespoeld.

De gebruiksooplossing voor de handmatige reiniging moet minimaal elke werkdag worden vernieuwd en bij zichtbare verontreiniging onmiddellijk worden vervangen.

### Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Niet mengen met andere producten.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.



# neodisher<sup>®</sup> MediClean

- Het reinigen, desinfecteren en steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- De gebruiksooplossing van neodisher MediClean moet in zijn geheel met water (bij voorkeur volledig zoutvrij) worden afgespoeld.
- Let op de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het reinigings- en desinfectieapparaat.

## Technische gegevens:

pH-waarde	10,2 - 10,5 (2 - 20 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C), bij water uit de waterleiding of onthard water evenals door bijvoorbeeld vervuild voorspoelwater kan de pH-waarde afwijken.
Dichtheid	ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Viscositeit	< 10 mPa s (concentraat, 20 °C)
Titreerfactor	0,8 (conform de titreerhandleiding van neodisher MediClean)

## Ingrediënten:


Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:  
< 5 % anionogene tensiden, niet-ionische tensiden  
tevens: enzymen

## CE-markering:

neodisher MediClean voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische producten.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie op de hoogte te worden gesteld.

## Opslaginstructies:

Koel maar vorstvrij opslaan. Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 25 °C worden aangehouden. Tegen zonlicht beschermen. Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

## Gevaar- en veiligheidsinstructies:

neodisher MediClean is geen gevaarlijke stof volgens de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

Verdere veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) in de rubriek 'Service/Downloads'.

MB 4043/2-6    Versie 08/2020