

# neodisher<sup>®</sup> MediZym

Détergent liquide, pH neutre  
Pour une utilisation en laveurs-désinfecteurs



## Principaux domaines d'utilisation :

Traitement manuel et en machine des instruments chirurgicaux, des ustensiles d'anesthésie, des endoscopes flexibles, des conteneurs et d'autres ustensiles médicaux.

## Propriétés :

neodisher MediZym est un détergent respectueux de l'environnement avec un pH neutre, des enzymes et autres composants protégeant le matériel. Les résidus de sang séchés ou dénaturés seront éliminés efficacement par neodisher MediZym.

L'acier inoxydable, les instruments en acier, les métaux ferreux, le verre, les plastiques habituels ainsi que les ustensiles d'anesthésie et les endoscopes flexibles sont compatibles avec la solution d'application du neodisher MediZym.

**Utilisation et dosage:** Pour le traitement des instruments en machine :  
0,2-1% (2-10ml) à 40-50°C

Pour le traitement en machine des endoscopes : 0,5% (5ml/l)

Pour le traitement manuel des instruments :  
En bain de trempage : 0,5-2%, 20-30min  
En bain ultrasons : 0,5-2%, 5-10min  
Chauffer la solution de nettoyage à max 45°C

Renouveler la solution d'application au moins une fois par jour.

Après application rincer complètement la solution neodisher MediZym avec de l'eau (de préférence déminéralisée). Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Le traitement doit être effectué conformément aux méthodes appropriées de la directive RKI et de la directive sur les dispositions médicaux.

Utilisation à usage professionnel uniquement

## Données Techniques:

Masse volumique (20°C) : 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Valeur pH (particulièrement en eau déminéralisée, 20°C)  
0.2-2% : 7,6-7,7

Viscosité (concentré 20°C) : <10 mPas



**DR. WEIGERT**

Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations-Immeuble Raspail --BP 88035 Villepinte-  
95932 ROISSY CDG CEDEX  
Tel : 01.48.67.90.33 - Fax : 01.48.67.29.14 - Email : [info@drweigert.fr](mailto:info@drweigert.fr) -  
[www.drweigert.fr](http://www.drweigert.fr) -

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.

# neodisher® MediZym

Détergent liquide, pH neutre  
Pour une utilisation en laveurs-désinfecteurs



- Composants :** Selon la recommandation européenne sur les détergents 648/2004:  
< 5% de tensioactifs anioniques  
Comprend également des enzymes, agents conservateurs: 2-phénoxyéthanol, Alkyl-4-hydroxybenzoate
- Marquage CE :** neodisher MediZym est conforme à la directive européenne 93/42/CEE
- Stockage :** A conserver au frais mais tenir à l'écart du gel. Le produit est valable 2 ans.
- Indications de risques et consignes de sécurité :** Conformément au règlement européen CLP Nr. 1272/2008/EC, neodisher® MediZym n'est pas un produit dangereux.
- Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant, se référer à la fiche de données de sécurité.
- Des informations complémentaires sur la sécurité et l'aspect environnemental sont disponibles sur les fiches de données de sécurité. Vous y accédez par notre site Internet [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com), onglet Téléchargements.

FT 4040  
04/2016



**DR. WEIGERT**

Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations-Immeuble Raspail --BP 88035 Villepinte-  
95932 ROISSY CDG CEDEX  
Tel : 01.48.67.90.33 - Fax : 01.48.67.29.14 - Email : [info@drweigert.fr](mailto:info@drweigert.fr) -  
[www.drweigert.fr](http://www.drweigert.fr) -

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.