

Reinigingsmiddel

---

## **BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:**

Machinale reiniging van chirurgische instrumenten, flexibele endoscopen, containers, anesthesietoebehoren en medisch-technische toebehoren.

## **EIGENSCHAPPEN:**

- pH-neutraal op basis van o.a. enzymen
- uitstekend werkzaam in geval van opgedroogd en gedatureerd bloed
- materiaalvriendelijk
- geschikt voor roestvast staal, instrumentenstaal, lichtmetaal, glas, gangbare kunststoffen en materialen voor anesthesietoebehoren, flexibele endoscopen

## **DOSERING/GEBRUIK:**

- **Machinale toepassing:**
  - *Instrumenten:* 2 – 10 ml/l bij 40 – 50 °C
  - *Endoscopen:* 5 ml/l
- **Manuele reiniging:**
  - *Dompelbad:* 5 – 20 ml/l, 20 – 30 minuten
  - *Ultrasonoor bad :* 5 – 20 ml/l, 5 – 10 minuten

Zo nodig gebruiksooplossing opwarmen tot **maximaal 45** °C.

*Gebruiksooplossing* minstens **twee** keer per dag verversen - bij intensief gebruik en grote mate van verontreiniging vaker (de standtijd van enzymen is ca. 4 uur!).

**NB:**

***Gebruiksooplossing*** na afloop goed *wegspoelen* (bij voorkeur met *RO-* of *demiwater*)

**Niet vermengen met andere producten!**

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

---

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

# PRODUCT-INFORMATIEBLAD

## neodisher<sup>®</sup> MediZym

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)

web site: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

Reinigingsmiddel

### PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	1,0 g/ cm <sup>3</sup>
pH ( in gedemineraliseerd water bij 45 °C) <b>2 – 20</b> ml/l:	7,6 –7,7
Viscositeit (concentraat, 20 °C):	< 10 mPas
Houdbaarheid:	<b>24</b> maanden (zie opslagcondities!)

**CE-MARKERING** (conform de richtlijn **93/42/EWG** voor medische producten):

**Ja**

### SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5% anionische tensiden
- enzymen, conserveermiddelen (phenoxyethanol, methyl-, ethyl-, butyl-, propyl-, isopropylparaben)

### HANTERING EN OPSLAG:

<b>Advies voor veilig hanteren:</b>	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
<b>Opslag:</b>	Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
<b>Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:</b>	-
<b>Minimum / maximum temperatuur:</b>	<b>zie etiket.</b>
<b>Overig:</b>	Niet blootstellen aan direct zonlicht.

**GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):** geen gevaar goed

### BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn <b>99/45/EC</b>	
Gevarensymbool:	-
Bijzondere gevaren:	-
Veiligheidsaanbevelingen:	-
	Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad.

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

# PRODUCT-INFORMATIEBLAD

## neodisher<sup>®</sup> MediZym

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)

web site: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

Reinigingsmiddel

---

### WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

<b>Concentraat + Gebruiksooplossing:</b>	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

### VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
404033	5 L (compact can)
404026	20 L
404013	220 KG

Versie: 13-09-2011 (vervangt versie: 24-07-2008)

*Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.*

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) !*

---

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.