



neodisher® Septo DN



Désinfectant pour le traitement en machine des endoscopes souples et instruments thermolabiles



Concentré liquide

Domaines d'application:

- Pour la désinfection des endoscopes souples et autres instruments thermolabiles en laveurs-désinfecteurs.
- Bactéricide, fongicide, tuberculocide, partiellement virucide et virucide. Efficacité désinfectante testée sur expertises.
- En phase de lavage, nous recommandons le détergent neodisher MediClean forte.
- L'utilisation du neodisher MediClean forte et de neodisher Septo DN dans les machines Wassenburg Adaptascope WD 440 permet une réduction de $> 9 \log_{10}$ et répond ainsi aux exigences de la norme EN ISO 15883-4.

Propriétés:

- Particulièrement peu odorant.
- Très bonne compatibilité matériels, compatible avec tous les principales marques d'endoscopes.
- Sans formaldéhyde et sans ammonium quaternaire.

Utilisation et dosage:

Le dosage du neodisher Septo DN s'effectue par le biais d'un appareil de dosage propre à la machine au début de la phase de désinfection.

Efficacité bactéricide, fongicide, tuberculocide et virucide.	1,0 %, 50 °C, 10 min
Efficacité bactéricide, levurocicide et partiellement virucide.	1,0 %, 55 °C, 5 min

Recommandations générales d'utilisation:

- Pour un usage professionnel uniquement.
- Après utilisation, rincer la solution de neodisher Septo DN abondamment à l'eau (si possible déminéralisée).
- Effectuer un rinçage complet du système de dosage y compris des cannes d'aspiration en cas de changement de produit.
- Le traitement du matériel doit être conforme à la réglementation sur les dispositifs médicaux.
- Respecter les recommandations des fabricants d'instruments conformément aux exigences de la norme EN ISO 17664.
- Respecter les recommandations des fabricants de laveurs-désinfecteurs.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.



neodisher® Septo DN

Expertises :

L'efficacité désinfectante a été testée par des expertises, disponibles sur demande.

Données techniques:

Valeur pH	7,3 (1,0 %, en eau adoucie (de 27°f à 0°f), 20°C) 4,2 (1,0 %, en eau déminéralisée, 20°C)
Viscosité	< 10 mPa s (concentré, 20 °C)
Poids spécifique	1,0 g/cm ³ (20°C)

Composants:

Substances désinfectantes dans 100 g:
6,0 g Glyoxal, 3,5 g Glutardialdéhyde


Marquage CE: 0297

neodisher Septo DN est conforme à la directive européenne 93/42/CEE Annexe I relative aux dispositifs médicaux.

Stockage:

Lors du stockage, conserver une température entre 0 et 30 °C.

3 ans dans les conditions recommandées.

Utilisable jusqu'à : Voir date indiquée sur l'étiquette, après le symbole .

Indications de risques et consignes de sécurité:

Classement et étiquetage selon les critères du décret des préparations dangereuses et de la directive européenne 99/45/CE.

Symbole de danger Xn - nocif
contient: Glyoxal < 10 %, Glutardialdéhyde

Indications de risques:

- R 20/22 - Nocif par inhalation et en cas d'ingestion.
- R 37/38 - Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
- R 41 - Risque de lésions oculaires graves.
- R 42/43 - Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
- R 68 - Possibilité d'effets irréversibles.

Consignes de sécurité:

- S 7 - Conserver le récipient bien fermé.
- S 23 - Ne pas respirer les vapeurs / aérosol.
- S 36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage.
- S 46 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche technique.

Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.fr - rubrique "service".

Conditionnement	Contenu
Bidon	20 L
Bidon	10 L
Bidon	5 L

FT 4010/3-2
02/2012

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.