

Let's workflow it



There is no substitute for quality

... mit dem Zirkon Workflow Set von der Weißlingsbearbeitung bis zur Politur alles in einem Set.

... with the zircon workflow set from processing pre-sintered zirconia to polishing all in one set.



Step 1

Weißlingsbearbeitung und Politur

- Raustrennen, Verputzen, Strukturieren mit Keramik-Fräsern
- Polieren mit dem 2 in 1 Polierer mittel/fein

processing and polishing pre-sintered zirconia

- separating, plastering, structuring with ceramic cutters
- polishing with the 2 in 1 polisher medium/fine



Step 2

Diamantdurchsetzte Schleifkörper

- ohne Wasserkühlung einsetzbar
- Ausdünnen von Rändern, Formkorrekturen

diamond interspersed abrasives

- to be used **without** water cooling
- thinning of edges, shape corrections



Step 3

ZIRAMANT Schleifer mit Spezialdiamantierung

- filigrane Feinkorrekturen:
- grün, schwarz: grobe Körnung
 - rot, rot: feine Körnung

ZIRAMANT instruments with special diamond coating

- filigree fine corrections:
- green, black: coarse grit
 - red, red: fine grit



Step 4

Diamantdurchsetzes Poliersystem

- Politur - 2-stufig
- 1. türkis, gelb: mittel
 - 2. rosa, gelb: fein

diamond interspersed polishing system

- polishing - 2-step
- 1. turquoise, yellow: medium
 - 2. pink, yellow: fine



Step 5

Bürste und Diamant-Polierpaste

- Hochglanzpolitur mit 3µ Diamantpaste

brush and diamond-polishpaste

- high shine polishing with 3µ diamond paste

Plexiglassockel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Acrylic glass base not included in delivery.

Zirkon Workflow Set



2 in 1 Polierer / KERA Keramik Fräser
2 in 1 polisher / KERA ceramic cutters

Diamantdurchsetzte Schleifkörper
Diamond interspersed abrasives

Step 1



HST/HP	9800	K433X	K426X	K423FX
ISO Ø	055	016	023	023

Step 2



HST/HP	D702
ISO Ø	120

ZIRAMANT Schleifer mit Spezialdiamantierung

ZIRAMANT instruments with special diamond coating

Step 3



FG lg	6855Z	6860Z	8855Z	8860Z	FG x-lg	6801LZ	6838LZ	8801LZ	8838LZ
ISO Ø	025	014	021	010	ISO Ø	014	012	011	009



2-stufiges diamantdurchsetztes Poliersystem

2-step diamond interspersed polishing system

Step 4



HST/HP unmontiert unmounted	9854	9853	9855	9856	9864	9863	9865	9866	305RS
ISO Ø	040	260	170	170	040	260	170	170	050

Pferdehaarbürste, harte Borsten
Horsehair, hard bristles

Step 5



HST/HP	9736
ISO Ø	140

Hochglanzpolierpaste, Diamant (3µ)
High shine polishing paste, diamond (3µ)



9646

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter www.busch.eu
For safety, usage and hygiene recommendations please refer to our website www.busch.eu



BUSCH & CO. GmbH & Co.KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741



BFLA1,0/12221