


3M Science.
Applied to Life.™

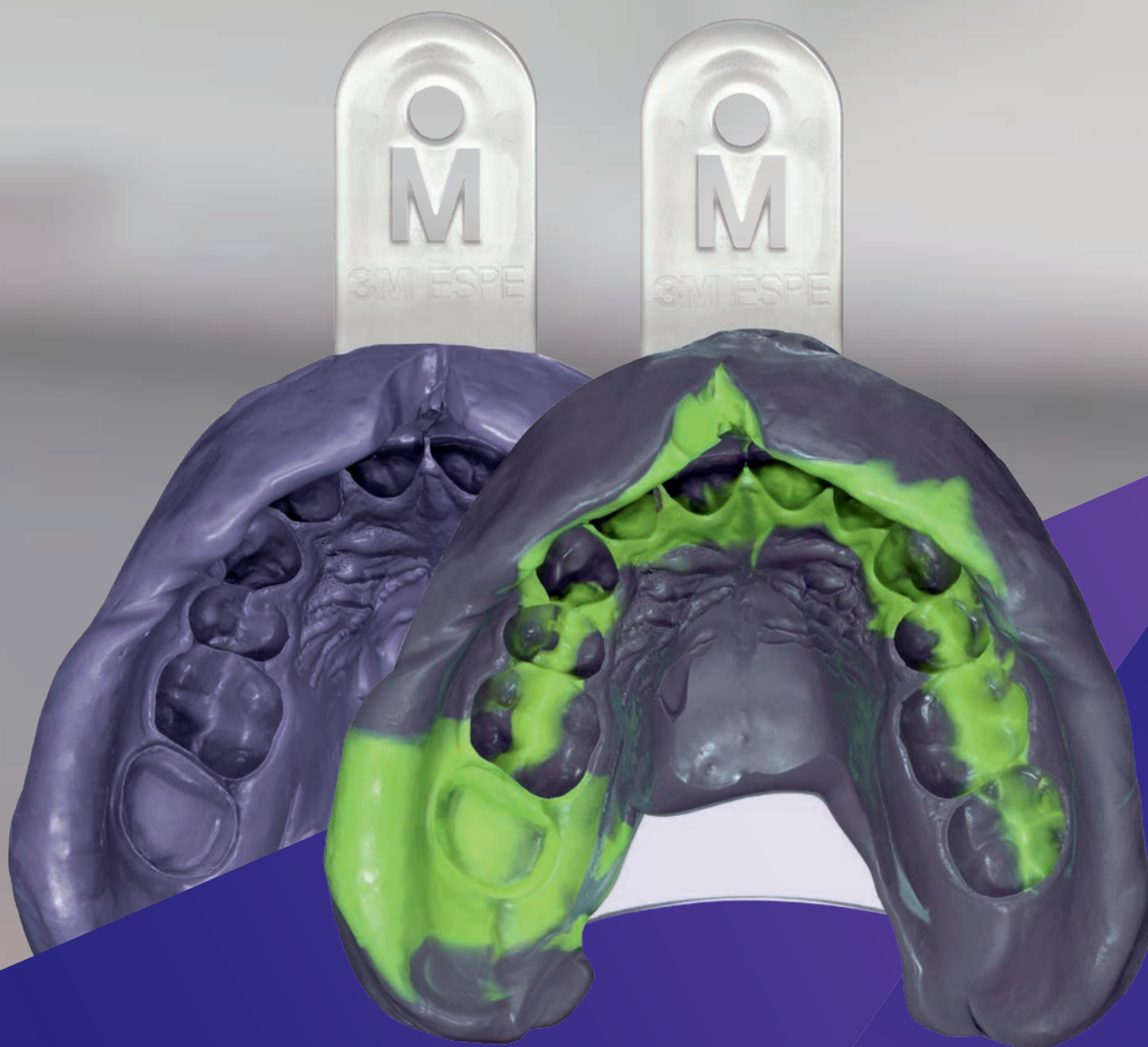

3M™ Impregum™ Super Quick
Polyether Abformmaterial


**Alle Details in 2 Minuten?
Ja, das geht!**

3M™ Impregum™ Super

Ihr schnellster Weg zu höchster Präzision bei kleineren Res

Impregum Polyether Abformmaterial hat sich als zuverlässige Lösung für komplexe Fälle und Implantatabformungen bewährt. Wäre es nicht großartig, wenn Sie von derselben erstklassigen Präzision und Detailwiedergabe auch bei der Herstellung von Einzelzahnversorgungen profitieren könnten?

Um Ihnen exakte Detailwiedergabe und gleichzeitig eine kurze Mundverweildauer zu bieten, wurde das neue Impregum Super Quick Polyether Abformmaterial entwickelt.

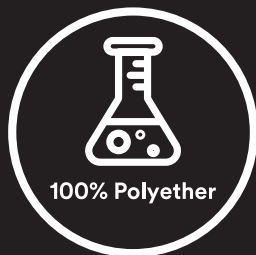

Bewährte Präzision. Schnelleres Abbinden.

So schnell, so gut: Mit einer Abbindezeit von nur 2 Minuten ermöglicht Ihnen das neue „Super Quick“ schnellere Abformungen auch bei kleineren Arbeiten wie Einzelkronen, Einzelimplantaten, Inlays/Onlays und kleineren Brücken bis zu 3 Einheiten.

Entwickelt für Ihren Erfolg.

Die neue Polyether-Rezeptur „made in Seefeld“ vereint erstklassige Präzision mit der Geschwindigkeit von A-Silikon.

Erhöht den Patientenkomfort.

Durch den verbesserten, frischen Minzgeschmack und die verkürzte Mundverweildauer wird die Abformung für den Patienten angenehmer.

Integriert sich mühelos in Ihren CAD/CAM-Workflow.

Impregum Super Quick Abformmaterial lässt sich mit den gängigen aktuellen Scannern erfassen – für eine effizientere Zusammenarbeit mit Ihrem Labor.

Quick. Bestester Polyether- taurationen.

„*Schnelles Abbinden bei guter
Detailwiedergabe auch bei nicht
100% trockenen Verhältnissen
und einem angenehmen Geschmack
für den Patienten.*“


Dr. Peter Baur, Schweiz



Umspritzen des präparierten Stumpfes mit
3M Impregum Super Quick Light-Body
Abformmaterial in der 3M Intra-oral Syringe
lila Einwegspritze.




Die Abformung gibt die Details exakt
wieder – inklusive scharfer Darstellung
der umlaufenden Präparationsgrenze.

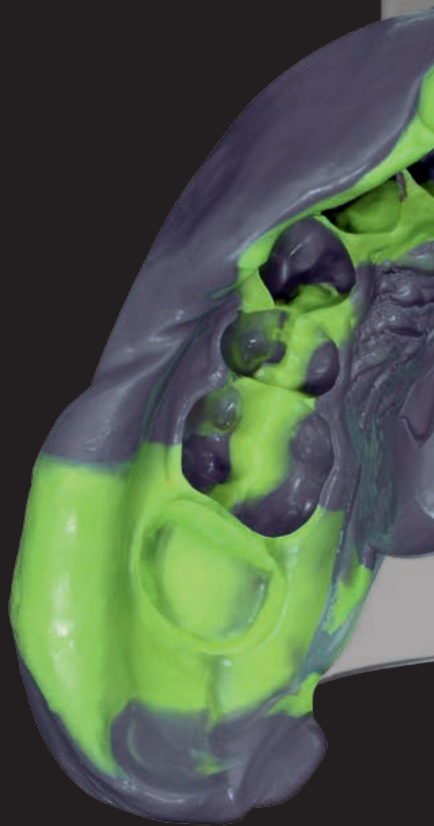

JETZT AUCH
SUPERSCHNELLE
**Polyether
Präzision**
als HEAVY BODY


3M™ Impregum™ Super Quick

- Der erste superschnelle Polyether mit 45 Sekunden Verarbeitungszeit und 2 Minuten Mundverweildauer
- Erhältlich als HEAVY-, MEDIUM- und LIGHT BODY-Konsistenz
- Geeignet für Monophase und Doppelmischtechnik
- Besonders geeignet für Einzelkronen, Einzelimplantate, Inlays/Onlays und kleinere Brücken (bis zu 3 Einheiten)

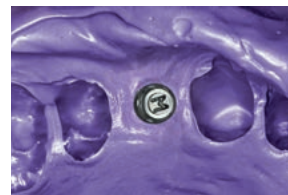


3M™ Impregum™ Polyether

Bewährte Vorteile für verläss

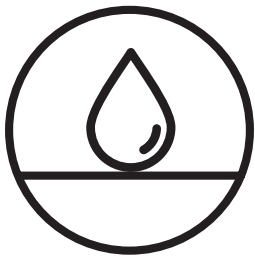


Von Natur aus hydrophil.

Das sorgt für eine exakte Detailwiedergabe und blasenfreie Abformungen – ein entscheidender Vorteil besonders bei subgingivalen Präparationsrändern. Die intrinsische Hydrophilie von Polyethern erlaubt trotz Feuchtigkeit den direkten Kontakt mit dem Gewebe.

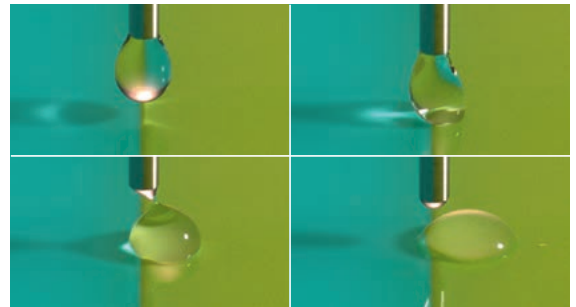

Die Oberfläche von 3M™ Impregum™ Polyether ist initial hydrophil, sodass im feuchten Milieu ein sofortiger Kontakt mit Zähnen und Gewebe entsteht. Der Vergleichstest mit einem A-Silikon beweist: Der Wassertropfen wird von Impregum™ Super Quick Abformmaterial – dem Material mit der höheren Hydrophilie (rechte Seite) – angezogen und bewegt sich sofort in Richtung des Materials.

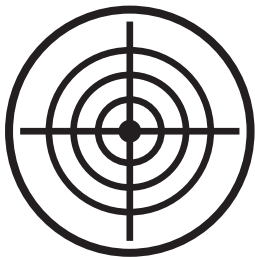

Unübertroffene Präzision.

Dank der hervorragenden Fließ-eigenschaften von Impregum Polyether Abformmaterial erfassen Sie sogar kleinste Details: Es fließt verlässlich selbst an schwierige Stellen und liefert blasenfreie Abformungen von unübertroffener Präzision.




3M™ Impregum™ Polyether Abformmaterial fließt selbst in feinste Strukturen von Hart- und Weichgewebe um jedes wichtige Detail zu erfassen.



Nehmen Sie sich ruhig Zeit.

Im Gegensatz zu A-Silikonen zeigt Impregum Polyether Abformmaterial eine konstante Fließfähigkeit während der kompletten Verarbeitungszeit. Impregum beginnt erst dann abzubinden, wenn die Verarbeitungszeit endet. Das garantiert Ihnen eine exakte Detailwiedergabe und Abformungen ohne Verzüge.

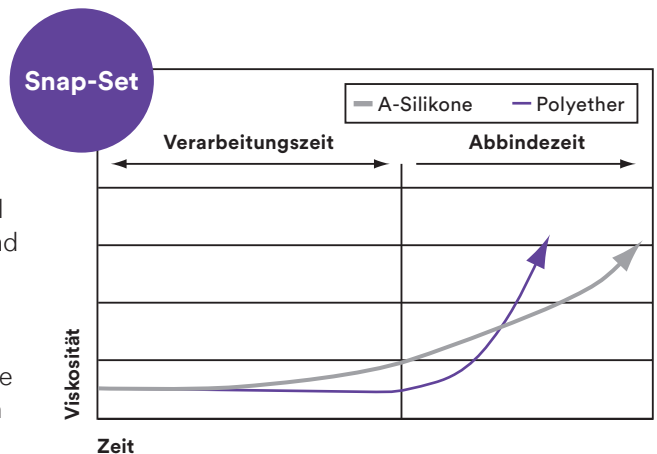

Im Gegensatz zu A-Silikonen zeigt Polyether konstante Fließ-eigenschaften über die komplette Verarbeitungszeit – gefolgt von sofortigem Abbinden (schematische Darstellung).

Abformmaterial. liche Präzision.



Vertrauen

Eine zuverlässige Marke – mit Vorteilen für alle Beteiligten.

- Spart Ihnen **Zeit und Geld**, da Sie auf Anhieb präzise Ergebnisse erzielen.
- **Sorgt** durch exakte Detailwiedergabe für eine **effiziente Zusammenarbeit** zwischen Ihnen und Ihrem Labor.
- Bietet einen **erhöhten Patientenkomfort**.

HIGHLY SATISFIED

Eine Studie mit 3M Impregum Super Quick Abformmaterial belegt:

95% der Teilnehmer sind **hochzufrieden** mit der **Präzision** der Abformungen und der **Passgenauigkeit** der finalen Restaurationen.



Quelle: 3M Field Evaluation mit 447 Teilnehmern aus Europa und den USA, 2017.

Für zuverlässige, präzise und komfortable

Immer die richtige Wahl für Ihre Indikation
und Technik.

Indikations-empfehlung		Abformtechnik	Einzelkrone	Implantat (≤ 2 Einheiten)	Inlay/onlay (≤ 2 Einheiten)	Brücke (≤ 3 Einheiten)	Veneer	Brücke (> 3 Einheiten)	Implantat (> 2 Einheiten)	Fixationsabformung	Funktionsabformung
Super schnell abbindende Materialien											
 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (MB)	Monophase										
	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (MB or HB) 3M™ Impregum™ Super Quick (LB)	Doppelmisch	✓	✓	✓	✓					
Schnell abbindende Materialien											
3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick (MB)	Monophase										
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick (HB) 3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick (LB)	Doppelmisch	✓	✓	✓	✓	✓					
Normal abbindende Materialien											
3M™ Impregum™ Penta™ Soft (MB)	Monophase										
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ (HB) 3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ (LB) 3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ (LB)	Doppelmisch						✓	✓	✓	✓	✓
3M™ Impregum™ Penta™ (MB)	Monophase						✓	✓	✓	✓	✓

Abformungen.

Alles, was Sie brauchen, um das Abformen zu vereinfachen.



Retrahieren

3M™ Adstringierende Retraktionspaste

Die schnelle und angenehme Art der gingivalen Retraction mit geringem Blutungsrisiko nach der Entfernung.



Umspritzen & Mischen

3M™ Intra-oral Syringe lila Einwegspritze

Einfache und präzise Applikation von Umspritzmaterialien für eine exakte Dosierung.

3M™ Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät

Blasenfreies Mischen von Abformmaterialien in Höchstgeschwindigkeit.



Abformen

3M™ Impregum™ Polyether Abformmaterial

Unerreichte Präzision für perfekt sitzende Restaurationen und weniger Korrekturen.
























Das neue Impregum™ Super Quick Abformmaterial

Superschnelle 2-Minuten-Abbindezeit für beeindruckende Präzision bei kleineren Arbeiten.



3M™ Impression Tray Einweg-Abformlöffel

Gebrauchsfertiger Abformlöffel mit Retentionsvlies, der ohne zusätzliches Löffeladhäsiv auskommt.

	Mischverfahren	Viskosität niedrig  hoch	Technik	Verarbeitungszeit (Min:Sek)	Mundverweildauer (Min:Sek)
Super schnell abbindende Materialien					
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (MB)			Monophase oder Doppelmisch	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (HB)			Doppelmisch	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick (LB)			Doppelmisch	0:45	2:00
Schnell abbindende Materialien					
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick (HB)			Doppelmisch	1:00	3:00
3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick (MB)			Monophase	1:00	3:00
3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick (LB)			Doppelmisch	1:00	3:00
Normal abbindende Materialien*					
3M™ Impregum™ Penta™ Soft (MB)			Monophase	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™ (MB)			Monophase	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ (HB)			Doppelmisch	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ (LB)			Doppelmisch	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ (LB)			Doppelmisch	1:45	4:15



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Produktinformation
Super schnell abbindende Materialien	
69383	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Intro Kit 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 1 Impregum™ Penta™ Super Quick – Medium Body Kartusche für Pentamix™ 3, 10 Penta™ Mischkanülen rot, 1 3M™ Penta™ Elastomerspritze, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml, 3 Kapseln à 0,3g Adstringierende Retraktionspaste
69381	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body Intro Kit 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 2 Kartuschen Impregum Super Quick – Light Body à 50 ml, 1 Impregum™ Penta™ Super Quick – Medium Body Kartusche für Pentamix 3, 10 Penta Mischkanülen rot, 5 Intra-oral Einweg-spritzen lila, 5 Garant™ Mischkanülen lila, 5 Garant™ Applikationsdüsen weiß, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml, 3 Kapseln à 0,3 g Adstringierende Retraktionspaste, 6 Impression Trays (1 Einweg-Abformlöffel je Größe)
69413	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body/Light Body Intro Kit 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 2 Kartuschen Impregum Super Quick – Light Body à 50 ml, 1 Impregum™ Penta™ Super Quick – Heavy Body Kartusche für Pentamix 3, 10 Penta Mischkanülen rot, 5 Intra-oral Einweg-spritzen lila, 5 Garant™ Mischkanülen lila, 5 Garant™ Applikationsdüsen weiß, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml, 3 Kapseln à 0,3 g Adstringierende Retraktionspaste, 6 Impression Trays (1 Einweg-Abformlöffel je Größe)
69404	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Upgrade Kit 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 10 3M™ Penta™ Mischkanülen rot
69411	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body/Light Body Upgrade Kit 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 1 Kartusche Impregum Super Quick – Light Body à 50 ml, 10 Penta Mischkanülen rot, 5 Intra-oral Einweg-spritzen lila, 5 Garant™ Mischkanülen lila, 5 Garant™ Applikationsdüsen weiß
69385	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Refill 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
69406	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Refill 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
69379	3M™ Impregum™ Super Quick Light Body Refill 4 3M™ Kartuschen à 50 ml, 5 3M™ Intra-oral Einwegspritzen lila, 5 3M™ Garant™ Mischkanülen lila
69405	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Value Pack 6 Basispaste à 300 ml, 6 Katalysator à 60 ml
69412	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Value Pack 6 Basispaste à 300 ml, 6 Katalysator à 60 ml
69387	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Kartusche
69401	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Kartusche
71454	3M™ Garant™ Mischkanülen lila 50 Garant Mischkanülen lila
Schnell abbindende Materialien	
P31772	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Intro Kit 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Kartusche für Pentamix™ 3, 10 Penta Mischkanülen rot, 2 Garant™ Kartuschen à 50 ml, 1 Garant™ Dispenser, 5 Garant™ Mischkanülen weiß, 5 Garant™ Applikationsdüsen weiß, 5 Impregum™ Einwegspritzen, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml
P31770	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Intro Kit 1 Basispaste 300 ml, 1 Katalysator 60 ml, 1 Impregum™ Penta™ Soft Kartusche für Pentamix™ 3, 10 Penta™ Mischkanülen rot, 1 Penta™ Elastomerspritze, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml
31766	3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick Refill 4 3M™ Garant™ Kartuschen à 50 ml, 10 3M™ Garant™ Mischkanülen weiß, 5 3M™ Intra-oral Einwegspritzen lila

Art.-Nr.	Produktinformation
Schnell abbindende Materialien	
31764	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Refill 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31768	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Refill 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
P3775	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Kartusche für Pentamix™ 3
P3773	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Kartusche für Pentamix™ 3
Normal abbindende Materialien	
P31684	3M™ Impregum™ Penta™ Intro Kit 1 Basispaste – 300 ml, 1 Katalysator – 60 ml, 1 Impregum™ Penta™ Kartusche für Pentamix™ 3, 10 Penta™ Mischkanülen rot, 1 Penta™ Elastomerspritze, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml
P31734	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Intro Kit 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ Soft Kartusche für Pentamix™ 3, 10 3M™ Penta™ Mischkanülen rot, 1 3M™ Penta™ Elastomerspritze, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml
P31738	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Intro Kit 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Kartusche für Pentamix™ 3, 10 3M™ Penta™ Mischkanülen rot, 2 3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ Kartuschen à 50 ml, 1 Garant™ Dispenser 1:1/2:1, 5 3M™ Garant™ Mischkanülen weiß, 5 3M™ Garant™ Applikationsdüsen weiß, 5 Intra-oral Einwegspritzen lila, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml
31644	3M™ Impregum™ Penta™ Refill 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31730	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Refill 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31740	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Refill 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31745	3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ Refill 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31751	3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ 4 Garant™ Kartuschen à 50 ml, 10 Garant™ Mischkanülen weiß, 5 Einwegspritzen
P3792	3M™ Impregum™ Penta™ Kartusche für Pentamix™ 3
P3787	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Kartusche für Pentamix™ 3
P3793	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Kartusche für Pentamix™ 3
P3795	3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ Kartusche für Pentamix™ 3
3M™ Pentamix™ 3 Automatische Mischgeräte	
77871	3M™ Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät – 230 V INT
77872	3M™ Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät CH – 230 V CH
Zubehör	
71507	20 3M™ Intra-oral Einwegspritzen lila
77580	1 Dispenser 1:1/2:1
77601	3M™ Pentamix™ 3 Wandhalterung
30600	3M™ Polyether Adhesive 17 ml – rot
69408	3M™ Polyether Contact Tray Adhesive 17 ml – blau
77949	50 3M™ Penta™ Mischkanülen rot
71451	50 3M™ Garant™ Mischkanülen weiß für Impregum DuoSoft L/L Quick
71461N	50 3M™ Garant™ Applikationsdüsen weiß

* Abbindezeit (ab Mischbeginn) 6:00 Min.



3M Deutschland GmbH · ESPE Platz · 82229 Seefeld · Freecall: 0800-2753773 · Freefax: 0800-3293773 · info3mespe@mmm.com · 3m.de/dental
 3M Österreich GmbH · Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien · Telefon: (01) 86686434 · Fax: (01) 86686330 · dental-at@mmm.com · 3maustria.at/dental
 3M Schweiz GmbH · Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon · Fax: (044) 7249480 · 3mespech@mmm.com · 3mschweiz.ch/dental

3M, 3M Science, Applied to Life., DuoSoft, Garant, Impregum, Penta und Pentamix sind Marken der 3M Company. © 3M 2018. Alle Rechte vorbehalten.

EF04-0292/03 (02.2020)